

	TARİH																														
BAKIM	AY:..... YIL:.....																														
GÜNLÜK	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Numune gönderici, reaktif gönderici veya yıkama suyu göndericide herhangi bir sızıntı olup olmadığını kontrol etme																															
Deterjan döner pompa biriminde herhangi bir sızıntı olup olmadığını kontrol etme																															
Esas deterjan miktarının kontrol edilmesi ve doldurulması																															
Numune probu, reaktif problemleri ve karıştırma çubuklarının kontrol edilmesi ve temizlenmesi																															
Yazıcı ve Kağıdın Manuel Olarak Kontrol Edilmesi																															
HAFTALIK	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Numune probu ve karıştırma çubuklarının manuel olarak temizlenmesi																															
W2'nin Gerçekleştirilmesi (Her bir probun, karıştırma çubuğunun ve küvet vs'nin otomatik yıkanması)																															
Photocal ölçümünün gerçekleştirilmesi																															
Numune ön seyreltme ünitesinin temizlenmesi																															
AYLIK	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Numune Probu ve Reaktif Probu Yıkama stasyonlarının Temizlenmesi																															
HbA1c prob yıkama istasyonlarının temizlenmesi																															
Karıştırma Çubuğu Yıkama İstasyonunun Temizlenmesi																															
Yıkama ağız biriminin temizlenmesi ve tüp montaj balantılarının kontrol edilmesi																															
Deiyonize Su Filtresinin Temizlenmesi																															
Numune Probu Filtresinin Temizlenmesi																															
ÜÇ AYDA BİR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Hava Filtrelerinin Temizlenmesi																															
Deiyonize Su Filtresinin Değiştirilmesi																															
Numune Probu Filtresinin Değiştirilmesi																															
Deiyonize Su Tankının Temizlenmesi																															
Deterjan Döner Tüpünün Değiştirilmesi																															

BAKIM	TARİH																														
	AY:.....															YIL:.....															
ALTI AYDA BİR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Fotometre Lambasının Değiştirilmesi																															
Küvetlerin ve Küvet Tekerleğinin Yıkınması																															
YILLIK VEYA GEREKTİĞİNDE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Yıkama ağız tüpü montaj balantılarındaki O-halkalarının değiştirilmesi																															
Küvetlerin değiştirilmesi																															
Reaktif problemlerinin manuel olarak yıkanması																															
Numune Probunun ve Reaktif Problemlerinin Değiştirilmesi																															
Karıştırma Çubuklarının Değiştirilmesi																															
Yıkama ağız bağlantısının değiştirilmesi																															
Şırıngaların değiştirilmesi																															
STAT tezgahı biriminin iç kısmının ve reaktif soğutma biriminin temizlenmesi																															
Antistatik fırçanın değitirilmesi																															
Rak kimlik etiketlerinin değiştirilmesi																															
Numune Probu ve Reaktif Probu Tüplerinin Değiştirilmesi																															
W1'in Gerçekleştirilmesi (numune probu ve küvetlerin otomatik olarak yıkanması)																															