

	KALİTE YÖNETİM DOKÜMANLARI	Dok.No : BL-TL-15 Yayın Tarihi :01.08.2017 G.G.Tarihi :27.11.2018-01 Revizyon No :01 Revizyon Tar.:27.11.2018 Sayfa No :1/3	
	BECKMAN COULTER UNİCEL Dxl 800 HORMON CİHAZI KULLANMA TALİMATI		

ORJİNAL DOKÜMAN KAPAK SAYFASI

Doküman Adı	HORMON CİHAZI BECKMAN COULTER UNİCEL Dxl 800 KULLANMA TALİMATI			
Doküman No	BL-TL-15			
Sayfa Sayısı	1/3			
Yürürlük Tarihi	01.08.2017			
Revizyon No	Yapılan Revizyon	Rev. Sayfası	Revizyon Tarihi	Revizyonu Yapan
01	Hormon cihazının değişmesi nedeniyle talimatın adı ve uygulama kısmındaki bilgiler değiştirilmiştir.		27.11.2018	Emine EREN
HAZIRLAYAN		KALİTE SİSTEM ONAYI		ONAY
LABORATUVAR SORUMLU TEKNİSYENİ		KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ		BAŞHEKİM

	KALİTE YÖNETİM DOKÜMANLARI	Dok.No : BL-TL-15 Yayın Tarihi :01.08.2017 G.G.Tarihi :27.11.2018-01 Revizyon No :01 Revizyon Tar.:27.11.2018 Sayfa No :2/3	
OPTIMED	BECKMAN COULTER UNİCEL Dxl 800 HORMON CİHAZI KULLANMA TALİMATI		

1. AMAÇ VE KAPSAM

Bu talimatın amacı Optimed Hastanesinde, laboratuvarında bulunan BECKMAN COULTER UNİCEL Dxl 800 hormon cihazının kullanımında ve bakımında dikkat edilecek hususları belirlemektedir.

2. TANIMLAR VE KISALTMALAR

OH : Optimed Hastanesi

3. REFERANS DOKÜMANLAR

Cihaz Sicil Kartı Form Kod No :(MC-FR-01)

4. UYGULAMA:

OH' de laboratuvarında bulunan BECKMAN COULTER UNİCEL Dxl 800 hormon cihazını kullanmadan önce; cihazın gerektirdiği şekilde kurulmuş ve bağlanmış olduğunu kontrol etmek gerekmektedir.

4.1. Cihazın Hazırlanması

- Öncelikle şu işlemler yapılır;
 - Ready-running'de iken hasta verilir.
 - Gri renkli racklara barkod öne gelecek şekilde sarı kapaklı tüpler yerleştirilir.
 - Cihaz otomatik çalışmaya alır.

4.2. Manuel Hasta Verme

- Mavi renkli racklar kullanılır.
- Hasta barkod numarası ve çalışılacak testler seçilir.
- SIMPLE MENEGER seçilir.
- NEW REQUEST seçilir.
- PATIENT QC REQUEST seçilir.
- GODE racka yerleştirilir ve verilir.

4.3. Cihaza Kit Yükleme

- Cihazın sağ yan tarafındaki kapak açılıp otomatik yapılır.
- Test sayısı
- SUPPLIES
- REAGENT SUPPLIES bölümünden kontrol edilir, tamamlanır.

4.4. Cihaz Solüsyonları Kontrol Etme

- SUPPLIES
- BULK SUPPLIES bölümünden kontrol edilir.

4.5. Kontrol Verme

- SIMPLE MENEGER
- NEW REQUEST
- PATIENT QC REQUEST seçilir.
- REQUEST QC' den istenilen kontrol seçilir.
- Kontrol yüksek veya düşüklüğünde kalibrasyon verilir.

	KALİTE YÖNETİM DOKÜMANLARI	Dok.No : BL-TL-15 Yayın Tarihi :01.08.2017 G.G.Tarihi :27.11.2018-01 Revizyon No :01 Revizyon Tar.:27.11.2018 Sayfa No :3/3	
OPTIMED	BECKMAN COULTER UNİCEL Dxl 800 HORMON CİHAZI KULLANMA TALİMATI		

4.6. Kalibrasyon Verme

- CALIBRATION
- CALIBRATOR SETUP bölümünden kalibrasyon numunesiyle uyumlu lot numarası seçilerek çalışılacak olan kalibrasyon testi seçilir.

4.7. Kontrol Sonuç Takibi

- QUALITY CONTROL' den çalışılan kontrol testi seçilerek REWIEV CHART AND DATA seçilir.
- 2S arasında olması gerekir.
- 2S arasında olmayan sonuçlar tekrarlanır veya kalibrasyon verilir.