

	KALİTE YÖNETİM DOKÜMANLARI	Doküman No: BL-TL-19 Yayın Tarihi : 01.08.2017 G.G.Tarihi : 27.11.2018-01 Revizyon No : 01 Revizyon Tar.: 27.11.2018 Sayfa No : 1/2	
	KARDİYAK CİHAZI KULLANMA TALİMATI		

ORJİNAL DOKÜMAN KAPAK SAYFASI

Doküman Adı	KARDİYAK CİHAZI KULLANMA TALİMATI			
Doküman No	BL-TL-19			
Sayfa Sayısı	1/2			
Yürürlük Tarihi	01.08.2017			
Revizyon No	Yapılan Revizyon	Rev. Sayfası	Revizyon Tarihi	Revizyonu Yapan
01	Kardiyak cihazının değişmesi nedeniyle uygulama kısmındaki bilgilerin değişmesi		27.11.2018	Emine EREN
HAZIRLAYAN		KALİTE SİSTEM ONAYI		ONAY
LABORATUVAR SORUMLU TEKNİSYENİ		KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ		BAŞHEKİM

	KALİTE YÖNETİM DOKÜMANLARI	Doküman No: BL-TL-19 Yayın Tarihi : 01.08.2017 G.G.Tarihi : 27.11.2018-01 Revizyon No : 01 Revizyon Tar.: 27.11.2018 Sayfa No : 2/2	
OPTIMED	KARDİYAK CİHAZI KULLANMA TALİMATI		

1. AMAÇ VE KAPSAM

Bu talimatın amacı Optimed Hastanesinde, laboratuvarında bulunan kardiyak cihazının kullanımında ve bakımında dikkat edilecek hususları belirlemektedir.

2. TANIMLAR VE KISALTMALAR

OH : Optimed Hastanesi

3. REFERANS DOKÜMANLAR

Cihaz Sicil Kartı Form Kod No :

4. UYGULAMA:

OH' de laboratuvarında bulunan AFIAS-6 kardiyak cihazını kullanmadan önce; cihazın gerektirdiği şekilde kurulmuş ve bağlanmış olduğunu kontrol etmek gerekmektedir.

4.1.Cihazın Hazırlanması

- Kitler 2-8 derecede muhafaza edilir.
- Çalışmaya başlamadan önce kartuşların en az 30 dk oda ısısına gelmesi beklenir.
- Çalışılan numune türü tam kan plazmadır.

4.2.Günlük Rutin Çalışma

- Cihaza kitin içerisinden çıkan TEST ID çipini cihazın ID çip portuna takılır.
- Test kartuşunu numune kuyucuğuna (Sample yazan kısmına) 100 ml pipetlenir.
- Kartuşu cihazın kartuş kuyucuğuna yerleştirilir.
- Kartuşun tip yazan pipet ucu kuyucuğuna kit kutusunuz içinden çıkan pipet ucu yerleştirilir.
- START' a basılır.
- 12 dakika inkubasyon sonrası test sonuçlanır.