

OPTIMED	KALİTE YÖNETİM DOKÜMANLARI	Dok.No :BL-TL-22 Yayın Tarihi :18.05.2019 G.G.Tarihi :... Revizyon No :00 Revizyon Tar:... Sayfa No :1/2	
	NEONATAL BİLİRUBİN (APEL BR-501) CİHAZI KULLANMA TALİMATI		

ORJİNAL DOKÜMAN KAPAK SAYFASI

Doküman Adı	NEONATAL BİLİRUBİN (APEL BR-501) CİHAZI KULLANMA TALİMATI			
Doküman No	BL-TL-22			
Sayfa Sayısı	18.05.2019			
Yürürlük Tarihi	1/2			
Revizyon No	Yapılan Revizyon	Rev. Sayfası	Revizyon Tarihi	Revizyonu Yapan
HAZIRLAYAN		KALİTE SİSTEM ONAYI		ONAY
LABORATUVAR SORUMLU TEKNİSYENİ		KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ		BAŞHEKİM

	KALİTE YÖNETİM DOKÜMANLARI	Dok.No :BL-TL-22 Yayın Tarihi :18.05.2019 G.G.Tarihi :... Revizyon No :00 Revizyon Tar:... Sayfa No :2/2	
	NEONATAL BİLİRUBİN (APEL BR-501) CİHAZI KULLANMA TALİMATI		

1. AMAÇ VE KAPSAM

Bu talimatın amacı Optimed Hastanesinde, laboratuvarında bulunan APEL BR-501 neonatal bilirubin cihazının kullanımında ve bakımında dikkat edilecek hususları belirtmektedir.

2. TANIMLAR VE KISALTMALAR

OH : Optimed Hastanesi

3. REFERANS DOKÜMANLAR

4. UYGULAMA:

OH' de laboratuvarında bulunan APEL BR-501 neonatal bilirubin cihazını kullanmadan önce; cihazın gerektirdiği şekilde kurulmuş ve bağlanmış olduğunu kontrol etmek gerekmektedir.

4.1.Günlük Çalışmaya Başlama

NUMUNE TÜRÜ: SERUM

Yenidoğan bebeklerin topuğundan hematokrit çubuğuna 2 numune alınır.

Bir tarafı macunlanır.

Bilirubin santrifüjüne macun tarafı dış tarafa gelecek şekilde konulur.

Santrifüj edildikten sonra her hasta öncesi kalibrasyon çalışılır.

Daha sonra hasta serumu okutulur.

Sonuç yazılır.