



KALİTE YÖNETİM
DOKÜMANLARI

ULTRASON CİHAZI
KULLANMA TALİMATI

Dok.No : HB-TL-13
Yayın Tarihi :23.11.2012
G.G.Tarihi :06.11.2017-05
Revizyon No :00
Revizyon Tar.:...
Sayfa No :1/1

ORJİNAL DOKÜMAN KAPAK SAYFASI

Doküman Adı	ULTRASON CİHAZI KULLANMA TALİMATI			
Doküman No	HB-TL-13			
Sayfa Sayısı	1/1			
Yürürlük Tarihi	23.11.2012			
Revizyon No	Yapılan Revizyon	Rev. Sayfası	Revizyon Tarihi	Revizyonu Yapan
HAZIRLAYAN		KALİTE SİSTEM ONAYI		ONAY
FİZYOTERAPİST		KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ		BAŞHEKİM

	KALİTE YÖNETİM DOKÜMANLARI	Dok.No : HB-TL-13 Yayın Tarihi :23.11.2012 G.G.Tarihi :06.11.2017-05 Revizyon No :00 Revizyon Tar.:... Sayfa No :1/1	
	ULTRASON CİHAZI KULLANMA TALİMATI		

1. AMAÇ VE KAPSAM

Optimed Hastanesi'nde ultrason cihazının kullanımı ile ilgili standartları belirlemek ve uygulamaktır.

2.TANIMLAR VE KISALTMALAR

OH : Optimed Hastanesi

FTR :Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

3. REFERANS DOKÜMANLAR

Kalibrasyon Planı Plan Kod No :(MC-PL-01)

Cihaz Sicil Kartı Plan Kod No :(MC-FR-01)

FTR Hijyen Planı Plan Kod No :(Dezenfektan Kullanım Listesi)

4.UYGULAMA

- El-el bileği hastaları dışındakiler, hasta mahremiyetine uygun olarak kapalı kabinlerde tedaviye alınır.
- Cihaz toprak hatlı prize takılır.
- Hasta tedavi yapılacak bölgesi açıkta kalacak şekilde giysilerini çıkarır.
- Tedavi yapılacak alandaki tüyler fazlaysa temizlenmiş olmalıdır.
- Hasta tedavisine uygun olarak tekerleksiz sandalyede oturur ya da sabit sedyeyi kullanır.
- Saç tedavi için engel teşkil edecekse hasta bone kullanır.
- Cihazın uygun programı seçilir. Yapılmak istenen tedaviye göre akım şiddeti ve süresi ayarlanır.
- Az miktarda jel tedavi bölgesine sıkılır, tedavi başlatılır.

4.1.Temizliği

- Tedavi sonunda jel kağıt peçete ile temizlenir. Prob başlığı uygun ile silinir,yerine konur.
- Cihaz temizliği FTR Hijyen Planına göre yapılır.

4.2.Cihaz Kalibrasyonu

- OH de her cihaz için cihaz sicil kartı bulunmaktadır.
- Tıbbi cihaz bakım planına göre bakımları yapılmaktadır.
- Kalibrasyon planına göre yılda bir kalibrasyonları yapılır.