

Bakım Kaydı Seri No. _____ Sistem ID No. _____ Ay _____ Yıl _____

Beckman Coulter, Inc. UniCel DxI System

GÜNLÜK BAKIM	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Sistemi Yedekleyin																															
Test Sayımını Kaydedin (Kaydetmek için forma dönün)																															
Katı Atık Kabını Sallayın																															
Günlük Temizleme Rutinini (D), veya Özel Temizleme Rutinini (S) Gerçekleştirin	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D
	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Teknisyen Adının İlk Harfleri																															

ÖZEL HAFTALIK BAKIM (HIV antikor seviyeleriyle ilgili testler yapıyorsanız)	Tarih	Tarih	Tarih	Tarih	Tarih
Temiz Emiş Problemleri Takın					
Sistem Performansını Doğrulayın (Temizleme Rutini ve Kalite Kontrol işlemlerini gerçekleştirin)					
Teknisyen Adının İlk Harfleri					

5000 TEST ARALIĞINDA UYGULANAN BAKIM	Tarih	Tarih	Tarih	Tarih	Tarih
Duck Bill Valfını Değiştirin					
Sistem Performansını Doğrulayın (Temizleme Rutini ve Kalite Kontrol işlemlerini gerçekleştirin)					
Teknisyen Adının İlk Harfleri					

10 000 TEST ARALIĞINDA UYGULANAN BAKIM	Tarih	Tarih	Tarih
Temiz Emiş Problemleri Takın			
Dağıtım Problemlerini Çıkarın ve Kontrol Edin			
Yıkama Tamponu Haznesindeki Pompa Bağlantılarını Kontrol Edin			
Üst Peristaltik Emiş Pompası Bağlantılarını Kontrol Edin			
Reaktif Pipetleyicilerini Kontrol Edin ve Yıkama Kulelerini Temizleyin			
Düşen RV olup olmadığını kontrol edin			
Sıvı Atık Gözünü Kontrol Edin			
Yıkama Tamponu Tedarik Gözünü Kontrol Edin			
Hava Filtresini Temizleyin			
Sistem Performansını Doğrulayın (Temizleme Rutini ve Kalite Kontrol işlemlerini gerçekleştirin)			
Teknisyen Adının İlk Harfleri			

Bakım prosedürlerini, her bir tabloda verilen sıra ile gerçekleştiriniz. Bir bakım prosedürü tamamlandığında onay işareti (✓) çizin veya ilgili kutudaki kodu daire içine alın. Programlanan bakım için tüm prosedürler tamamlandığında, adınızın baş harflerini yazın. Uygun şekilde tarihi ve test sayımını ekleyin.

Art arda 10 000 ve 5000 test aralığındaki bakım prosedürlerini planlıyorsanız, önce 10 000 test aralığındaki prosedürleri gerçekleştirin. 10 000 ve 5000 test aralığındaki prosedürleri tamamladıktan sonra günlük bakım prosedürlerini gerçekleştirin.

Günlük bakımı özel haftalık veya test aralığı bakımıyla kombine ettiğinizde bir temizleme rutinini sadece son bakım basamağınızda bir kez çalıştırmanız gerekir.

Bu sayfa laboratuarda kullanılmak üzere kopyalanabilir.