

	KALİTE YÖNETİM DOKÜMANLARI	Doküman No: BL-TL-05 Yayın Tarihi : 27.11.2018 Revizyon No :00 Revizyon Tar.:... Sayfa No :1/3
OPTIMED	HBA1C CİHAZI KULLANMA TALİMATI	

Revizyon No	Yapılan Revizyon	Rev. Sayfası	Revizyon Tarihi	Revizyonu Yapan
Gözden Geçirme	Gözden Geçirildi	Tüm İçerik	06.11.2019	Emine EREN Laboratuvar Sorumlu Teknisyeni
HAZIRLAYAN		KALİTE SİSTEM ONAYI	ONAY	
LABORATUVAR SORUMLU TEKNİSYENİ		KALİTE YÖNETİCİSİ	BAŞHEKİM	

	KALİTE YÖNETİM DOKÜMANLARI	Doküman No: BL-TL-05 Yayın Tarihi : 27.11.2018
OPTIMED	HBA1C CİHAZI KULLANMA TALİMATI	Revizyon No :00 Revizyon Tar.:... Sayfa No :2/3

1. AMAÇ VE KAPSAM

Bu talimatın amacı, laboratuvarda bulunan BIORAD D-10 Glikolize Hemogloblin (HBA1C) cihazının kullanımında ve bakımında dikkat edilecek hususları belirlemektedir. Laboratuvar işleyiş sürecini kapsar.

2. TANIMLAR VE KISALTMALAR

3. REFERANS DOKÜMANLAR

4. UYGULAMA:

Laboratuvarda bulunan HBA1C cihazını kullanmadan önce; cihazın gerektirdiği şekilde kurulmuş ve bağlanmış olduğunu kontrol etmek gerekmektedir.

4.1. Günlük Rutin Çalışma

- START UP ile cihazı aktif hale getirilir.
- Barkodlar ön tarafa gelecek şekilde racka yerleştirilir.
- Cihaza verilir
- START
- YES
- YES
- EJECT ile rack çıkartılır.
- Solüsyonları değiştirmeden reset yapılır.
- Kontrol çalışılır.
- Kontrol kötü ise kalibrasyon çalışılır.

4.2.Manuel Hasta Çalışma

- Mor kapaklı ependof kullanılır.
- 5 mikro kan ve 1.5 ml distile su veya WASH DİLEVE solüsyonu racka yerleştirilir.
- EDIT
- ID NO yazılır
- DONE
- START
- YES
- YES

4.2.Kontrol Çalışma

- 5 mikro dondurulmuş kontrol solüsyonu
- 1.5 ml distile su
- START
- Barkodlu olduğu için çalışacak

	KALİTE YÖNETİM DOKÜMANLARI	Doküman No: BL-TL-05 Yayın Tarihi : 27.11.2018
OPTIMED	HBA1C CİHAZI KULLANMA TALİMATI	Revizyon No :00 Revizyon Tar.:... Sayfa No :3/3

4.3. Kalibrasyon Çalışma

- A1C kalibratör godelerine en tepeye kadar doldurulur.
- 1-2 pozisyonlara koy
- Kontrolleri de tepeye kadar yükle
- EDIT
- CAL1, CAL2, QC yaz
- START
- YES
- YES
- CAL 1: 5,3
- CAL 2: 10,5 olmalıdır. Yıldızlı okumammalıdır.

5.SORUMLULAR

Bu talimatın uygulanmasından laboratuvar sorumlu teknisyeni ve tüm laboratuvar teknisyenleri sorumludur.