

	KALİTE YÖNETİM DOKÜMANLARI	Doküman No : BL-TL-21 Yayın Tarihi : 01.08.2017 Revizyon No : 00 Revizyon Tar.:... Sayfa No :1/2
	HEMOGRAM SYSMEX XT-1800İ CİHAZI KULLANMA TALİMATI	

Revizyon No	Yapılan Revizyon	Rev. Sayfası	Revizyon Tarihi	Revizyonu Yapan
Gözden Geçirme	Gözden Geçirildi Son Gözden Geçirme:06.02.2018-01	Tüm İçerik	05.02.2019	Emine EREN Laboratuvar Sorumlu Teknisyeni
HAZIRLAYAN		KALİTE SİSTEM ONAYI		ONAY
LABORATUVAR SORUMLU TEKNİSYENİ		KALİTE YÖNETİCİSİ		BAŞHEKİM

OPTIMED	KALİTE YÖNETİM DOKÜMANLARI	Doküman No : BL-TL-21 Yayın Tarihi : 01.08.2017 Revizyon No : 00 Revizyon Tar.:... Sayfa No :2/2
	HEMOGRAM SYSMEX XT-1800İ CİHAZI KULLANMA TALİMATI	

1. AMAÇ VE KAPSAM

Bu talimatın amacı, laboratuvarda bulunan SYSMEX XT-1800İ cihazının kullanımında ve bakımında dikkat edilecek hususları belirlemektedir. Laboratuvar işleyiş sürecini kapsar.

2. TANIMLAR VE KISALTMALAR

3. REFERANS DOKÜMANLAR

4. UYGULAMA:

Laboratuvarda bulunan SYSMEX XT-1800İ cihazını kullanmadan önce; cihazın gerektirdiği şekilde kurulmuş ve bağlanmış olduğunu kontrol etmek gerekmektedir.

4.1. Cihazın Hazırlanması ve Günlük Rutin Çalışma

- Cihaz her sabah açıp kapatılır.
- Kontrol kanı verilir.
- Solüsyonları kontrol edilir.
- Hasta numune türü olan edtalı tam kan geldiğinde racka dizilir.
- Cihaz okuma yerine konulur.
- SAMPLER'e basılır.

5.SORUMLULAR

Bu talimatın uygulanmasından laboratuvar sorumlu teknisyeni ve tüm laboratuvar teknisyenleri sorumludur.