

Revizyon No	Yapılan Revizyon	Rev. Sayfası	Revizyon Tarihi	Revizyonu Yapan
HAZIRLAYAN		KALİTE SİSTEM ONAYI		ONAY
HEMŞİRELİK HİZMETLERİ DİREKTÖRÜ		KALİTE YÖNETİCİSİ		BAŞHEKİM

	KALİTE YÖNETİM DOKÜMANLARI	Doküman No : HB-TL-79 Yayın Tarihi :26.09.2019 Revizyon No :00 Revizyon Tar.:... Sayfa No :2/3
	KÜVÖZ KULLANMA TALİMATI	

1. AMAÇ VE KAPSAM

Bu talimatın amacı; küvözlerin kullanımı ile ilgili standartları belirlemek uygulanmasını sağlamaktır. Hasta bakım sürecini kapsar.

2. TANIMLAR VE KISALTMALAR

HBYS :Hastane Bilgi Yönetim Sistemi

112 : Acil Çağrı Merkezi

3. REFERANS DÖKÜMANLAR:

Dezenfektan Kullanım Listesi

Küvöz Temizleme Talimatı

4. UYGULAMA:

Kurumumuzda doğan, muayene için gelen veya 112 ile sevkli gelen hastaların tedavi için Yeni doğan yoğun bakıma yatırılır. Buradaki bebekleri takip etmek için kuvöze alınır. Bunun için;

- Temizlenmiş olan küvöz hasta gelmeden önce ısınması için fişe takılır.
- Cihaz açma kapama düğmesinden açılır.
- İçindeki yatağının örtüsü örtülerek bebek yatacak duruma getirilir.
- Küvözün tüm kapakları kapatılarak çalıştırılır.
- Gelen hastanın durumuna ve kilosuna göre küvöz ısı ayarı için cilt probu takılır ve küvözün ön tarafındaki dijital göstergeleri ayarlanır.
- 500 gramla 1000 gram arasındaki inmatür bebeklerde 34-35 C' ye,
- 1500 gramla 2000 gram arasındaki prematürlerde 32-33 C' ye
- 2500 gramla 3000 gram arasındaki matür bebeklerde 30-31 C' ye küvöz ısı ayarlanır.
- Bebeğin ısınıp göstermesi için cilt ısı probu bebeğin abdominal bölgesine (cilde) antialerjik flasterle tesbit edilir.
- Küvöz bebeğin vücut ısınıp ayarladıktan sonra kendi ısınıp bebeğin vücut ısınıp 36-37C' derece tutacak şekilde ayarlar. Ayrıca bebek cilt ısı göstergeden 37°C' ye ayarlanır.
- Bebeğin solunum sıkıntısı durumuna göre oksijen ayarlaması yapılır. Küvözün direkt iç kısmına veya küvözün arka kısmındaki oksijen giriş yerlerine oksijen hortumu takılır.
- Bebeğin normal ısınıp sağlayabilmek için ısı ayar düğmesi yavaş yavaş artırılarak istenen düzeye getirilir.
- Küvöz içindeki oksijenin nemlendirilmesi için küvözün sol ve ön tarafındaki su haznesine su seviyesi çizgisine kadar distile su koyulur.
- Acil müdahale gerekmedikçe küvöz kapağı tam olarak açılmadan kolluklardan çalışılır.
- Dışardaki çelik kollardan yararlanılarak hastaya istenilen pozisyon verilir.
- Hasta küvözden çıkarıldıktan sonra kirli olan küvöz oda dışına çıkarılır.
- Nemlendirme kabındaki su boşaltılarak temizliği yapılır.
- Küvöz Temizleme Talimatı' na uygun olarak servis personeline temizletilir.

	KALİTE YÖNETİM DOKÜMANLARI	Doküman No : HB-TL-79 Yayın Tarihi :26.09.2019 Revizyon No :00 Revizyon Tar:... Sayfa No :3/3
	KÜVÖZ KULLANMA TALİMATI	

- Havalandırılması sağlanır.
- Yeni yatacak hasta için küvöz hazır bulundurulur.
- Cihazlar arızalandığı zaman servis sorumlu hemşiresine haber verilir. Servis sorumlu hemşiresi HBYS üzerinden arıza bildirimi yapar.
- Yatak yüzeyinde bütünlük bozulması var ise yenisi ile değiştirilmelidir.

5.SORUMLULAR

Küvöz kullanan tüm sağlık çalışanları sorumludur.