



KALİTE YÖNETİM DOKÜMANLARI

VENTİLATÖR KULLANMA TALİMATI

Doküman No: HB-TL-84
Yayın Tarihi : 27.09.2019
Revizyon No :00
Revizyon Tar:....
Sayfa No :1/2

Revizyon No	Yapılan Revizyon	Rev. Sayfası	Revizyon Tarihi	Revizyonu Yapan
HAZIRLAYAN		KALİTE SİSTEM ONAYI		ONAY
HEMŞİRELİK HİZMETLERİ DİREKTÖRÜ		KALİTE YÖNETİCİSİ		BAŞHEKİM

	KALİTE YÖNETİM DOKÜMANLARI	Doküman No: HB-TL-84 Yayın Tarihi : 27.09.2019
	VENTİLATÖR KULLANMA TALİMATI	Revizyon No :00 Revizyon Tar:.... Sayfa No :2/2

1. AMAÇ VE KAPSAM

Bu talimatın amacı; ventilatörün kullanımı ile standartları belirlemek ve uygulanmasını sağlamaktır. Ventilatörün kullanımını kapsar.

2. TANIMLAR VE KISALTMALAR

OH : Optimed Hastanesi

3. REFERANS DÖKÜMANLAR:

Dezenfektan Kullanım Listesi

El Yıkama ve Eldiven Giyme Talimatı

4. UYGULAMA:

İşlem öncesi, El Yıkama ve Eldiven Giyme Talimatı'na göre eller yıkanıp eldiven giyilir.

- Ventilatör açma tuşu ile açılır. Çocuk için çocuk; erişkin için erişkin mod ayarı yapılmalıdır.
- Şarj ve oksijen seviyesinin yeterli olduğu kontrol edilip işleme başlanmalıdır.
- Solunun devresi uygun biçim de ventilatöre bağlanması sağlanıp kaçak olmadığından emin olunmalıdır.
- Hasta devresi ventilatöre bağlanır.
- Sistemi test etmek için test balonu takılır.
- Hastanın solunun durumuna göre mod ayarı sağlanır. CPAP, CMV, PTV, SIMV, ALC uygun mod seçilir.
- Hastanın kilosu kilosuyla orantılı ve hastada yeterli tidal volümü oluşturacak parametre ayarları yapılır.
- Hastaya verilecek FiO2 değeri belirlenip ayarlanması sağlanır.
- Hastanın durumuna göre dakika da verilmesi gereken soluk sayısı ayarlanır.
- Uyarı sisteminin açık olmasından dolayı ses duyulur. Ses gelmiyor ise açık olmasından emin olunur.
- Test balonuyla test edilip yeterli ventilasyon sağlandığından emin olunur.
- Bütün bu ayar ve uygulamalar yapıp tekrardan kontrol edildikten sonra hasta devresinden test balonu çıkartılıp hasta ile bağlantı sağlanmalı, hastaya yeterli desteği sağlayabiliyor ise işleme devam edilmeli.
- Hastanın günlük durumuna göre ayarlar değişebilir.
- Hasta entübe edildikten sonra cihaz ve oksijen kapatılır.
- Cihaz temizliği, Dezenfektan Listesi'ndeki uygun dezenfektan ile yapılır.
- Kullanıma hazır bırakılır.

4.1.Cihaz Bakım, Kalibrasyon ve Temizliği

Cihaz Yönetimi Prosedürü'ne göre bakım ve kalibrasyonları yapılır. Cihaza ait bilgiler HBYS üzerinde Demirbaş Yönetimi modülünde mevcuttur. Cihaz temizliği nemli bez ile yapılır.

5.SORUMLULAR

Ventilatör kullanan tüm sağlık çalışanları sorumludur.