

	KALİTE YÖNETİM DOKÜMANLARI	Doküman No : TH-TL-03 Yayın Tarihi : 31.08.2013 Revizyon No :00 Revizyon Tar.:... Sayfa No :1/2
	TROMBOSİT ÇALKALAMA CİHAZI KULLANMATALİMATI	

Revizyon No	Yapılan Revizyon	Rev. Sayfası	Revizyon Tarihi	Revizyonu Yapan
HAZIRLAYAN		KALİTE SİSTEM ONAYI	ONAY	
KAN TRANSFÜZYON KURULU BAŞKANI		KALİTE YÖNETİCİSİ	BAŞHEKİM	

	KALİTE YÖNETİM DOKÜMANLARI	Doküman No : TH-TL-03 Yayın Tarihi : 31.08.2013 Revizyon No :00 Revizyon Tar.:... Sayfa No :1/2
	TROMBOSİT ÇALKALAMA CİHAZI KULLANMATALİMATI	

1. AMAÇ VE KAPSAM

Optimed hastanesinde kullanılan trombosit çalkalama cihazının standartlarını belirlemek ve uygulamaktır. Trombosit saklanması için kullanılan 250 ml'lik plastik torbaları yatay konumda sürekli olarak çalkayarak içindeki trombositin çökmesini engellemektedir.

2.TANIMLAR VE KISALTMALAR

OH : Optimed Hastanesi

3. REFERANS DOKÜMANLAR

Cihaz Yönetimi Prosedürü

4.UYGULAMA

- Cihazınızın güç kablosunu prize taktığınızda otomatik olarak çalışmaya başlayacaktır.
- 10 saniye süreyle durdurmak istediğinizde gecikme butonuna basınız.
- Cihaz 10 saniye sonunda otomatik olarak yeniden çalışmaya başlayacaktır.
- Elektronik kontrol sistemi sayesinde elektrik kesintisi veya arıza durumunda sesli uyarı vererek kullanıcıya uyarmaktadır.

4.1.Temizliği

- Haftada bir tel rafların temizliği yapılır.
- Cihazın temizliği cihazın güç kablosunu cihazdan ayırdıktan sonra yapınız.
- Kir ve tozlara karşı cihazınızı ıslak bez ile siliniz.
- Zor çıkan kirlere karşı sıvı deterjan kullanabilirsiniz.
- Actosept yüzey temizleyici ile temizliğini yapınız ve kullanımında gereken titizliği gösteriniz.
- Hariçten gelebilecek pas lekelerinden cihazı mutlaka koruyunuz. En küçük pas lekesi bile olsa derhal temizleyiniz.

4.2. Cihaz Kalibrasyonu

Cihaz Yönetimi Prosedürü'ne göre cihazları kalibre edilir. Cihaza ait bakım, kalibrasyon vb cihaz bilgileri HBYS üzerinde Demirbaş Yönetimi modülünde bulunmaktadır.

5.SORUMLULAR

Bu talimatın uygulanmasından cihazı kullanan çalışanlar sorumludur.