



KALİTE YÖNETİM DOKÜMANLARI

OKSİJEN JENERATÖRÜ KULLANMA TALİMATI

Doküman No :TY-TL-13
Yayın Tarihi :17.05.2022
Revizyon No :00
Revizyon Tar.:
Sayfa No : 1 / 3

Revizyon No	Yapılan Revizyon	Rev. Sayfası	Revizyon Sayfası	Revizyonu Yapan

HAZIRLAYAN	KALİTE SİSTEM ONAYI	ONAY
TEKNİK VE TEKNOLOJİK HİZMETLER YÖNETİCİSİ	KALİTE YÖNETİCİSİ	BAŞHEKİM

	KALİTE YÖNETİM DOKÜMANLARI	Doküman No :TY-TL-13 Yayın Tarihi :17.05.2022
	OKSİJEN JENERATÖRÜ KULLANMA TALİMATI	Revizyon No :00 Revizyon Tar.: Sayfa No : 2 / 3

1.AMAÇ VE KAPSAM

Cihazın güvenli kullanımını sağlamak. Kurumdaki oksijen jeneratörünün kullanımını ve dikkat edilecek husuları kapsar.

2.TANIMLAR VE KISALTMALAR

3.REFERANS DOKÜMANLAR

4.UYGULAMA

Oksijen jeneratörü, bulunduğu yerde havanın içindeki oksijenin ayrılması ile ihtiyaca uygun miktarda basınç ve saflıkta oksijen üreten sistemlerdir. İki adet oksijen jeneratörü toplamda 2 adet komprasör 2 adet oksijen jeneratörü 2 adet kurutucu 2 adet hava tankı ve oksijen tankı olmak üzere 10 parça ekipmandan oluşmaktadır biri ana olmak üzere diğeri takviye (yedek basınca göre takviye eden bir sistem) olarak sistem kurulmuştur 5 bar basınçla %93 saflıkta oksijen üretimi yapılmaktadır. Bunlara ilave olarak herhangi bir arızaya karşılık eski sistemdeki oksijen tüplerimiz iki adet tam dolu palet tüpümüz sisteme bağlı bulunmaktadır.

Dikkat edilecek hususlar;

- 1- Her vardiyada 2 defa sistem fiziki olarak kontrol edilmelidir.
- 2- Her vardiyada tanklardaki su ve hava purjörleri bir kere boşaltılmalı ve içindeki su atılmalıdır.
- 3- Komprasörün alarm durumuna bakılmalı komprasör sıcaklıkları takip edilmeli ve kayıt altına alınmalıdır.
- 4- Sistemin kurulu olduğu gaz odası ortam sıcaklığı kontrol edilmeli ve kayıt altına alınmalıdır.
- 5- Jeneratörlerin basınçları kontrol edilmelidir.
- 6- Oksijen hattı fiziki olarak kontrol edilmelidir.
- 7- Herhangi bir sorunla karşılaşılması durumunda birinden biri devrede olacaktır. Basıncı dengelemezse sistem komple kapatılıp tüpler devreye alınmalıdır .

5.SORUMLULAR

Bu talimatın uygulanmasından tüm teknik servis görevlileri ve teknik ve teknolojik hizmetler

	KALİTE YÖNETİM DOKÜMANLARI	Doküman No :TY-TL-13 Yayın Tarihi :17.05.2022
	OKSİJEN JENERATÖRÜ KULLANMA TALİMATI	Revizyon No :00 Revizyon Tar.: Sayfa No : 3 / 3

yöneticisi sorumludur.