

ORJİNAL DOKÜMAN KAPAK SAYFASI

Revizyon No	Yapılan Revizyon	Rev. Sayfası	Revizyon Tarihi	Revizyonu Yapan
01	Sedye kızıakları, ilaç temini ve temizlik bölümlerinin genişletilmesi.		02.01.2010	
02	Çalışan güvenliği kullanım dezenfektanları ile ilgili bilgi eklenmesi.		04.04.2011	Acil Servis Aydın BAKI
03	Ambulans Canlandırma Ünitesi ve Çantası Kontrol Formu Ambulans İlaç Serum ve Kontrol Listesi Ambulans Malzeme Stok ve Kontrol Formu eklendi.		05.05.2023	Sevda SÜMBÜL Hemşirelik Hizmetleri Direktörü
HAZIRLAYAN		KALİTE SİSTEM ONAYI		ONAY
HEMŞİRELİK HİZMETLERİ DİREKTÖRÜ		KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ		BAŞHEKİM

	KALİTE YÖNETİM DOKÜMANLARI	Doküman No: AS-TL01 Yayın Tarihi :01.03.2009
	AMBULANS KONTROL MALZEME TEMİNİ VE TEMİZLİK TALİMATI	Revizyon No:03 Revizyon Tar.:05.05.2023 Sayfa No :2/6

1.AMAÇ VE KAPSAM

Optimed Hastanesinde ambulans hizmetlerinin hasta ve çalışan güvenliğini sağlayacak şekilde düzenlenmesidir.

2.TANIMLAR VE KISALTMALAR

ASSH : Acil Servis Sorumlu Hemşiresi

3. REFERANS DOKÜMANLAR

Ambulans Canlandırma Ünitesi ve Çantası Kontrol Formu

Ambulans İlaç Serum ve Kontrol Listesi

Ambulans Malzeme Stok ve Kontrol Formu

Ambulans Kontrol Formu

Hasta Transfer Formu

Ambulans Hasta Muayene ve Gözlem Formu

Dezenfektan Kullanım Listesi

Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliği

Tehlikeli Maddeler Listesi

Tehlikeli Maddeler Rehberi

Yıllık Eğitim Planı

4.UYGULAMA

4.1.Ambulansın Genel Kontrolü

- Her gün ambulans ASSH/ ambulanstaki çalışan sağlık personeli tarafından, Ambulans Hizmetleri Yönetmeliğine göre Ambulans Kontrol Formu ile kontrol edilir.

4.2. Ambulans İlaç ve Malzeme Temini

- Ambulans Canlandırma Ünitesi ve Çantası Kontrol Formu , Ambulans İlaç Serum ve Kontrol Listesi ve Ambulans Malzeme Stok ve Kontrol Formu ile ambulanstaki acil çantası, ilaçlar ve malzemeler kontrol edilir. Eksik malzeme ve ilaç ve/veya kritik stok miktarının altına düşen malzeme tespit edildiği zaman, hemen eksikler tamamlanır. Eğer o an için depoda bu malzeme yoksa veya ambulans görev için dışarı gidecekse, malzeme ve ilaç acil servis veya diğer bölümlerden temin eder.
- Her ay son cumartesi günü İlaçların Etkin ve Güvenli Yönetimi Prosedürü'ne göre ilaçların son kullanma tarihleri kontrol edilir. Eğer son kullanma tarihi yaklaşan ilaç varsa sarı renkli “ SON KULLANMA TARİHİ YAKLAŞAN İLAÇ “ etiketi yapıştırılır ve/veya depoya iade edilir.

4.2. Sedyeye Kızaklarının Sabitlenmesi

- Ambulansın sedyesi her gün sabah nöbet değişiminde ambulans şoförü ile o gün nöbetçi olan bir sağlık personeli tarafından Ambulans Kontrol Formu'na göre kontrol edilir.

	KALİTE YÖNETİM DOKÜMANLARI	Doküman No: AS-TL01 Yayın Tarihi :01.03.2009
	AMBULANS KONTROL MALZEME TEMİNİ VE TEMİZLİK TALİMATI	Revizyon No:03 Revizyon Tar.:05.05.2023 Sayfa No :3/6

- Hasta sedye ile ambulansa yerleştirilirken tekerleklerin açılıp kapandığından emin olunur.
- Hasta sedyede emniyet kemerleri ile mutlaka sabitlenir.
- Sedyeye taşıyabileceği ağırlıktan fazlası yüklenmez.
- Herhangi bir arıza durumunda sedye kesinlikle kullanılmaz ve teknik servise bilgi verilerek gerekli tamirat işlemleri yapıldıktan sonra kullanılır.

4.3. Ambulansın Temizliği

Ambulans temizliği Ambulans Temizlik Planı ve Kontrol Formu'na göre yapılarak kayıt altına alınır.

4.3.1. Ana Sedye ve Faraş Sedyenin Bakım ve Temizliği:

- Dezenfektan Kullanım Listesine uygun olarak yıkanmış ve sıkılmış temizlik bezi ile tüm metal parçalar silinerek işlem tamamlanır.
- Aynı şekilde tüm plastik parçalar ve şilte silinir, su ve sabunlu nemli bezle durulandıktan sonra kurularak işlem tamamlanır. Bu işlem haftada bir ve her vakadan sonra rutin olarak tekrarlanır.

4.3.2. Vakum Sedyenin Bakım ve Temizliği:

- Dezenfektan Kullanım Listesine uygun olarak yıkanmış ve sıkılmış temizlik bezi ile tüm metal parçalar silinerek işlem tamamlanır.
- Pompa, Dezenfektan Kullanım Listesine uygun olarak yıkanmış ve sıkılmış temizlik bezi ile tüm yüzey alt üst edilerek silinir, nemli bezle durulandıktan sonra kurularak işlem tamamlanır.

4.3.3. Sırt Tahtası (Spine Board)

- Dezenfektan Kullanım Listesine uygun olarak yıkanmış ve sıkılmış temizlik bezi ile tüm yüzey alt üst edilerek silinerek işlem tamamlanır.
- Baş tespit yastığı, olağan koşullarda temizliği, Dezenfektan Kullanım Listesine uygun olarak yıkanmış temiz bez ile tüm yüzey alt üst edilerek silinir işlem tamamlanır.
- Olağandışı koşullar da (çok kanlı ve kirlenmişse. vb.), bol tazyikli su ile yıkandıktan sonra, Dezenfektan Kullanım Listesine uygun olarak yıkanmış ve sıkılmış temizlik bezi ile tüm yüzey alt üst edilerek silinerek işlem tamamlanır.

4.3.4. Portatif Vakum Aspiratörünün Bakım ve Temizliği

- Toplama kavanozunun içindeki atıklar kapağını açarak veya üstündeki büyük delikten tıbbi atık kutusuna boşaltılır.
- Vakum Aspiratör çalıştırılıp, emme hortumu ve ucunun içi temizleninceye kadar işleme devam edilir. Temizlendikten sonra bol su ile durulanır.
- Emme hortum ve ucu toplama kabına bağlanır.
- Uygun biçimde toplanan malzeme çantasına yerleştirilerek işlem tamamlanır.

4.3.5. Seyyar Tansiyon Aletinin Bakım ve Temizliği:

- Dezenfektan Kullanım Listesine uygun olarak yıkanmış temizlik bezi ile manşon, puar ve hortumları silinir, su ve sabunlu nemli bezle durulandıktan sonra kurularak işlem tamamlanır.

	KALİTE YÖNETİM DOKÜMANLARI	Doküman No: AS-TL01 Yayın Tarihi :01.03.2009
	AMBULANS KONTROL MALZEME TEMİNİ VE TEMİZLİK TALİMATI	Revizyon No:03 Revizyon Tar.:05.05.2023 Sayfa No :4/6

- Aynı işlem stetoskop kulaklık ve hortumları için de tekrarlanır.

4.3.6. Şişme Atellerin Bakım ve Temizliği

- Her biri için aynı işlem, Dezenfektan Kullanım Listesine uygun olarak temizlik bezi, ile tüm yüzeyi alt üst edilerek silinir, su ve sabunlu nemli bezle durulandıktan sonra kurularak işlem tamamlanır. Her kullanımdan sonra işlem tekrarlanır.
- Temizlik ve bakım işlemi bittikten sonra her biri uygun şekilde çantasına veya ambulansın iç bölmesine düz olarak yerleştirilir.
- Şişme ateller düzenli bir şekilde her kullanımdan sonra fermuar ve delik açısından kontrol edilir.

4.3.7. Ayarlı Boyunluk Setinin Bakım ve Temizliği

- Her biri kullanıldıktan sonra, hazırlanan klor tabletli su ile hazırlanmış suda yıkanmış ve sıkılmış temizlik bezi ile tüm yüzeyi alt üst edilerek silinir, su ve sabunlu nemli bezle durulandıktan sonra kurularak işlem tamamlanır.

4.3.8. Canlandırma Çantasının Bakım ve Temizliği.

- Hazırlanan canlandırma çantası yıkanmış ve sıkılmış temizlik bezi ile iç ve dış olmak üzere tüm yüzeyi silinerek işlem tamamlanır.
- Laringoskop Seti ve Bladelerin Bakım ve Temizliği:
 - Her nöbet değişiminde öncelikle kontrol edilmelidir. Bladelerin ampullerinin sağlam olup olmadığına bakılır. Laringoskopun pili kontrol edilir, zayıflamış piller değiştirilir.
 - Laringoskop hazırlanan sodyum hipokloritli suda yıkanmış ve sıkılmış temizlik bezi ile silinir, su ve sabunlu nemli bezle durulandıktan sonra işlem tamamlanır.
 - Laringoskop bladeleri ise her kullanımdan sonra klor tabletli su ile hazırlanmış karışımda suda yıkanır, dezenfektan madde ile silinir bol su ile durulanır ve kurularak kilitli poşet içerisinde çantasına yerleştirilerek işlem tamamlanır. Temizlik işlemi sırasında özellikle ampullerin kıvrımlarına dikkat edilmelidir
- Portatif Oksijen ve Çantasının Bakım ve Temizliği:
 - Her nöbet değişimi sırasında portatif oksijen tüpünün dolu olup olmadığı kontrol edilir.
 - Sırt çantasında kullanılıyorsa haftada bir kez sırt çantası klor tabletli su ile hazırlanmış karışımda yıkanır. Bol su ile durulandıktan sonra kurutularak kullanıma hazır hale getirilir.
- Balon Valf Maske Setinin Bakım ve Temizliği
 - Ambu ve seti her kullanımdan sonra mutlaka temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir.

4.3.9. Kurtarma Yeleğinin Bakım ve Temizliği:

- Kurtarma yeleği kullanıldıktan sonra düz bir yüzeye yayılarak önce ilgili karışım ile silinir sonra nemli bezle silinip durulanır.
- Temizlik işlemi bittikten sonra tekrar paketlenir. Kurtarma yeleği sırt kısmı üste gelecek şekilde düz bir yüzeye yayılır. Göğüs kemerleri zikzak şekilde katlanır ve Velcro tutucularla tutturulur. Yeleği

	KALİTE YÖNETİM DOKÜMANLARI	Doküman No: AS-TL01 Yayın Tarihi :01.03.2009
	AMBULANS KONTROL MALZEME TEMİNİ VE TEMİZLİK TALİMATI	Revizyon No:03 Revizyon Tar.:05.05.2023 Sayfa No :5/6

- sarmaya, tokalar iç tarafa bakacak şekilde göğüs kemerleri (hastanın sağ tarafı) tarafından başlanır.
- Boyun desteği ve alın/çene kemerleri yelekle beraber veya ayrı olarak sarılabilir. Bütün parçalar taşıma çantasına yerleştirilir.

4.3.10. Mekanik Ventilatrörün Bakım ve Temizliğı:

- Atılabilir bir bez ve normal deterjan ile temizlenebilir.
- Ünitenin iç kısmına sıvıların girmemesine dikkat edilmelidir.
- Sökülen parçalar, uygun dezenfektan ile yıkanır. Akan su altında çalkalanır.

4.3.11. Defibrilatörün Bakım ve Temizliğı:

- Her kullanımdan sonra nemlendirilmiş bir bezle tüm yüzeyi silinerek işlem tamamlanır.
- Derivasyon ve pulse oksimetre kabloları nemlendirilmiş bir bezle silinerek işlem tamamlanır.
- Defibrilatörün kaşıkları asla jelli bırakılmamalıdır. Her kullanımdan sonra nemli bezle silinir. Tam olarak jelden arınan kaşıklar (kesinlikle) kurularak kullanıma hazır hale getirilir.

4.3.12 Defi Monitörün Bakım ve Temizliğı:

- Defi Monitörü ve Duvar Monte Rafı gibi tüm aksesuarları, mevcut temizleyicilerle temizlenir.
- Temizlik için hafifçe nemli ve temiz bir bez kullanılır.
- Dezenfekte etmek için, standart dezenfektan solüsyonu kullanılır.
- Her uygulamadan sonra kaşıklar temizlenir, jelden tamamen arınmış kaşıklar kurularak kullanıma hazır hale getirilir.

4.3.13. Ambulans İç Temizliğı

- Uygulamayı gerçekleştirecek tüm personel eldiven kullanmalıdır.
- Malzemeler eksiksiz olarak hazırlanır.
- Hastanın ve/ veya yaralının temas ettiği her yüzey temizlenir.
- Ambulans içerisindeki dolap sistemi, taban ve tavan kaplaması ile yan panel kaplamalarının temizliğinde klor tabletli su ile hazırlanmış solüsyon kullanılarak, ardından tekrar dezenfektan madde ile silinip durulandıktan sonra kurularak işlem tamamlanır.
- Öncelikle köşe ve ayrıntılardan başlanır.
- Araç iç zemini uygun biçimde süpürölür.
- Ilık sabunlu su ile yer yüzeyi temizlenir.
- Yumuşak bezle mutlaka kurulama işlemi yapılır.
- Araç bir süre havalandırılır.
- Kontamine iğne uçları vb. materyal kesici-delici alet atık kutularında toplanacaktır.
- Kesici-delici atık kutularının değişimi Sharp Box Değıştirme Talimatı'na göre sağlanır.

4.3.14. Ambulans Dış Temizliğı

- Uygulamayı gerçekleştirecek tüm personel eldiven kullanmalıdır

	KALİTE YÖNETİM DOKÜMANLARI	Doküman No: AS-TL01 Yayın Tarihi :01.03.2009
	AMBULANS KONTROL MALZEME TEMİNİ VE TEMİZLİK TALİMATI	Revizyon No:03 Revizyon Tar.:05.05.2023 Sayfa No :6/6

- Malzemeler eksiksiz olarak hazırlanır.
- Aracın üstü, önü, arkası ve yanlarını sırasıyla yıkanır.
- Ambulansı yıkamada öncelikle tekerlek ve jantlar yıkanmalı ve çamurlarının akıtılması sağlanmalıdır.
- Aracın tepesinden başlanarak ılık veya soğuk su ile tüm araç yıkanır.
- Sabun veya araç şampuanı su ile köpürtülür.
- Uygun fırçayla tepeden başlayarak tüm dış yüzey yıkanır.
- Temiz su ile aynı şekilde durulama yapılır.
- Yumuşak bezle mutlaka kurulama işlemi yapılır.
- Paspaslar olanaklar dâhilinde tam kurumadan yerleştirilmemelidir

4.4.Ambulans Hizmetleri

- Ambulans çağırılması veya hasta sevk durumunda öncelikle Ambulans Sürecine uygun olarak hareket edilir. Ambulans ile ilgili sorumluluk acil servis sorumlu hemşiresindedir. Sorumlu hemşire, gerektiği durumlarda Hemşirelik Hizmetleri Direktörü veya Başhemşireye danışarak ambulans isteklerine cevap verir.
- Ayrıca ambulansın dışarıdan hasta getirmesi ve/veya hastayı bir başka kuruma nakletmesi durumunda ambulans ile ilgili gerekli hazırlıkları mesai saatleri içerisinde sorumlu hemşire yapar ve planlar.
- Ambulans hastayı sevk edecekse Hasta Transfer Prosedürü'ne uygun olarak gerekli hazırlıklar yapılır. Ayrıca Hasta Transfer Formu ve Pediatrik /Erişkin vaka nakil talep formu doldurulur ve bir sureti teslim edilen hastaneye verilir.
- Ambulans vaka getirdiğin de Ambulans hasta muayene ve gözlem formu doldurulur.Hasta tedaviyi red eder ise red kısmına imza alınır.

4.5. Çalışan Güvenliği-Kullanılan Dezenfektanlar ile İlgili Alınan Önlemler

Temizlik işlemi sırasında kullanılan dezenfektanların bir çoğu Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliğine göre Tehlikeli Madde sınıfına girilmektedir. Bu yüzden Tehlikeli Maddeler Listesi bulunmaktadır. Dezenfektanlar ile ilgili MSDS(Ürün Güvenlik Bilgi Formu) firmalardan istenmekte olup, bölümlerde bulunan Tehlikeli Maddeler Rehberi içinde bu maddelerin MSDS leri bulunmaktadır. Tehlikeli Maddeler Rehberinde dezenfektanlar ile ilgili dikkat etmesi gereken konular, riskler, alınacak önlemler, depolama ve kullanma yöntemleri gibi konular bulunmaktadır.

Personele Yıllık Eğitim Planına uygun olarak yılda bir defa Tehlikeli Maddeler, MSDS ve dikkat edilmesi gereken kuralları içeren eğitim verilmektedir.