

Revizyon No	Yapılan Revizyon	Rev. Sayfası	Revizyon Tarihi	Revizyonu Yapan
HAZIRLAYAN		KALİTE SİSTEM ONAYI		ONAY
RADYOLOJİ SORUMLU TEKNİSYENİ		KALİTE YÖNETİCİSİ		BAŞHEKİM

	KALİTE YÖNETİM DOKÜMANLARI	Doküman No:RG-TL-08 Yayın Tarihi :15.06.2023 Revizyon No :00
	RÖNTGEN CİHAZI KULLANIM TALİMATI	Revizyon Tar.: Sayfa No :2/2

1.AMAÇ VE KAPSAM

Talimatın amacı kurumda bulunan röntgen cihazlarının doğru ve verimli kullanılmasını sağlayarak cihazların kullanım ömrünü uzatmaktır. Kurumda bulunan röntgen cihazlarının kullanımını kapsar.

2.TANIMLAR VE KISALTMALAR

HBYS: Hastane Bilgi Yönetim Sistemi

3.REFERANS DOKÜMANLAR

Cihaz Yönetimi Prosedürü

Temizlik ve Dezenfeksiyon Planı

4.UYGULAMA

4.1.Cihaz Kullanımı

Radyoloji bölümümüzde birime gönderilen hastaların radyoloji tetkikleri yapılır. Yataklı servis ve acil servisten gelen hastalara öncelik tanınır.

Gelen hastaların bilgileri kimlik doğrulama yapıldıktan sonra kontrol edilip çekim sırasına göre çekim odasına alınır.

Çekilecek grafinin niteliğine göre ilgili vücut bölümünün hazırlanması için hastaya talimat verilir.

Çekim öncesi röntgen masası ve akciğer stafının temiz olduğuna dikkat edilir.

Çekim yapılacak bölgede metal herhangi bir şey olmadığına dikkat edilir.

Çekim yapılacak kasetin ilgili yerlerine yön işareti yerleştirilir. Kaset çekilecek bölgeye göre masaya ya da staja yerleştirilir.

Hastanın pozisyonu çekilecek grafinin niteliğine göre ayarlanır.

Mesafe ayarı yapılır. Kumanda masasına geçilerek KV ve MAS ayarı yapılır. Expojer butonuna basılarak çekim gerçekleştirilir.

4.2.Cihaz Arızası, Bakımı ve Kalibrasyonu

Cihaz arızaları birim çalışanı veya sorumlusu tarafından HBYS 'de arıza kaydı girilip biyomedikal birimine iletilir.

Cihazın bakım, onarım ve kalibrasyonu Cihaz Yönetimi Prosedürü'ne göre yapılır.

4.3.Cihaz Temizliği

Cihazın temizliği Temizlik ve Dezenfeksiyon Planı doğrultusunda yapılır.

5. SORUMLULAR

Bu talimatın uygulanmasından tüm radyoloji teknikerleri/teknisyenleri ve radyoloji hekimleri sorumludur.