

Revizyon No	Yapılan Revizyon	Rev. Sayfası	Revizyon Tarihi	Revizyonu Yapan
HAZIRLAYAN		KALİTE SİSTEM ONAYI		ONAY
RADYOLOJİ SORUMLU TEKNİSYENİ		KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ		BAŞHEKİM

OPTİMED	KALİTE YÖNETİM DOKÜMANLARI	Doküman No:RG-TL-09 Yayın Tarihi :15.06.2023 Revizyon No :00
	PANORAMİK RÖNTGEN CİHAZI KULLANIM TALİMATI	Revizyon Tar.: Sayfa No :2/2

1.AMAÇ VE KAPSAM

Talimatın amacı radyoloji bölümü panoramik röntgen cihazının verimli ve doğru bir şekilde kullanılmasını sağlayarak kullanım ömrünü uzatmaktır. Hastanemizde bulunan panoramik röntgen cihazının kullanımını kapsar.

2.TANIMLAR VE KISALTMALAR

HBYS: Hastane Bilgi Yönetim Sistemi

3.REFERANS DOKÜMANLAR

Cihaz Yönetimi Prosedürü

Temizlik ve Dezenfeksiyon Planı

4.UYGULAMA

4.1.Cihaz Kullanımı

Cihaz açma/kapama düğmesine basılarak açılır.

Cihazla bağlantılı bilgisayar açılır ve ilgili program seçilerek panoramik cihazı ile bilgisayar arasındaki bağlantılı kurulur.

Programdan hasta görüntüleme programı açılır.

Girişi yapılan hastalar sıra ile çekim odasına alınır.

Hastanın baş ve boynunda mevcut küpe ve benzeri metal eşyalar çıkartılır ve hastaya kurşun önlük giydirilir.

Cihaz üzerindeki ayarlama düzeneklerinden istenilen bölgeye göre pozisyon verilir.

Cihaz üzerinde bulunan ısıрма aparatı üzerine tek kullanımlık kılıf takılır. Hastaya çentik kısmı ısırması söylenir.

Hastaya pozisyon verdikten sonra baş, alın sabitlemesi yapıp çekim odasında çıkılıp şutlama butonuna basılır.

Çekim sonunda hasta görüntüsü kontrol edilip sisteme kaydedilir.

Aparattaki kılıf atılır. Cihaz temizlenir.

Mesai bitiminde cihaz açma/kapama düğmesinden kapatılır.

4.2.Cihaz Arızası, Bakımı ve Kalibrasyonu

Cihaz arızaları birim çalışanı veya sorumlusu tarafından HBYS 'de arıza kaydı girilip biyomedikal birimine iletilir.

Cihazın bakım, onarım ve kalibrasyonu Cihaz Yönetimi Prosedürü'ne göre yapılır.

4.3.Cihaz Temizliği

Cihazın temizliği Temizlik ve Dezenfeksiyon Planı doğrultusunda yapılır.

5. SORUMLULAR

Bu talimatın uygulanmasından tüm radyoloji teknikerleri/teknisyenleri ve radyoloji hekimleri sorumludur.