

	KALİTE YÖNETİM DOKÜMANLARI	Dok.No : HB-TL-22 Yayın Tarihi :01.03.2009 Revizyon No :02 Revizyon Tar.:30.05.2012 Sayfa No :1/3
	EFORLU EKG KULLANMA TALİMATI	

Revizyon No	Yapılan Revizyon	Rev. Sayfası	Revizyon Tarihi	Revizyonu Yapan
01	4. Kısım uygulamaları değişikliği.		04.02.2011	Eğt. Hemş. Melek KAYA
02	Zımparalı elektrolar yardımı ile hastanın göğsüne yapıştırılır yada alkollü gazlı bez ile elektrot yapıştırılır, eklenecek.		30.05.2012	Hem. Hiz. Sevda SÜMBÜL
Gözden Geçirme	Gözden geçirildi. Son gözden geçirme:30.05.2017-08	Tüm içerik	06.11.2020	Hemşirelik Hizmetleri Direktörü Sevda SÜMBÜL
Gözden Geçirme	Gözden geçirildi.	Tüm içerik	01.12.2023	Hemşirelik Hizmetleri Direktörü Sevda SÜMBÜL
HAZIRLAYAN		KALİTE SİSTEM ONAYI		ONAY
HEMŞİRELİK HİZMETLERİ DİREKTÖRÜ		KALİTE YÖNETİCİSİ		BAŞHEKİM

	KALİTE YÖNETİM DOKÜMANLARI	Dok.No : HB-TL-22 Yayın Tarihi :01.03.2009 Revizyon No :02 Revizyon Tar.:30.05.2012 Sayfa No :2/3
	EFORLU EKG KULLANMA TALİMATI	

1. AMAÇ VE KAPSAM

Bu talimatın amacı; Eforlu EKG cihazının kullanımı ile standartları belirlemek ve uygulamaktır. efor ünitesindeki işleyiş sürecini kapsar.

2. TANIMLAR VE KISALTMALAR

EKG :Elektrokardiyografi

3. REFERANS DÖKÜMANLAR:

Dezenfektan Kullanım Listesi

4. UYGULAMA:

Eforlu EKG cihazı kullanılırken aşağıdaki hususlara dikkat edilir:

- Cihaz topraklı hatlı prize takılır.
- Hastanın belden yukarısındaki giysileri çıkartılır.
- Zımparalı elektrotlar yardımı ile hastanın göğsüne zımpara sürülür ve elektrotlar takılır.Ya da alkollü gazlı bez ile elektrot yapıştırılacak yerlerin temizliği yapılır.
- Kablo bağlantıları elektrotlara bağlanır.
- Elektrotlar düşmesin diye file bandaj giydirilir.
- Cihaz bilgisayar kasasından açılır ve cihazın programına girilir.
- Hastanın bilgileri programa girilir.
- Hasta oturtulur, tansiyonu alınır ve kaydedilir.
- Hastanın tansiyonu çok yüksek ise doktor istemine göre ilaç verilir.
- Hasta yürüyüş bandına çıkartılır, başlat düğmesinden yürüyüşe başlatılır.
- Test sırasında da tansiyon aralıklar ile ölçülür.
- Hedef hıza gelince, aşırı yorgunluk tansiyon çok yükseldiğinde ve EKG değişikliğinde test sonlandırılır.
- Hemen sonra dinlenme EKG ve tansiyonu alınır, kaydı yapılır.
- Dinlenme 5. dakikada biter.
- Hastadan elektrotlar çıkartılır ve raporlar verilir.
- Bilgisayar uygun yöntemle kapatılır.
- Cihazı açma/kapama düğmesinden kapatılır.
- Cihazın genel temizliği Dezenfektan Kullanım Listesine göre yapılır, bir sonraki kullanım için cihaz hazır halde bekletilir.

4.1. Cihazın Temizliği

Cihazın temizliği için kullanılan dezenfektan malzeme beze sıkılarak temizliği yapılır.

4.2.Cihaz Kalibrasyonu

Tüm cihazlar HBYS'de demirbaş modülünde tanımlıdır. Kalibrasyon ve bakım planları bu modül üzerinden

	KALİTE YÖNETİM DOKÜMANLARI	Dok.No : HB-TL-22 Yayın Tarihi :01.03.2009 Revizyon No :02 Revizyon Tar.:30.05.2012 Sayfa No :3/3
	EFORLU EKG KULLANMA TALİMATI	

takip edilmektedir.

5.SORUMLULAR

Bu talimatın uygulanmasından cihazı kullanan hemşireler sorumludur.