



KALİTE YÖNETİM DOKÜMANLARI

FOTOTERAPİ CİHAZI
KULLANMATALİMATI

Doküman No : HB-TL-18

Yayın Tarihi :01.06.2013

Revizyon No :00

Revizyon Tar.:...

Sayfa No :1/1

Revizyon No	Yapılan Revizyon	Rev. Sayfası	Revizyon Tarihi	Revizyonu Yapan
Gözden Geçirme	Gözden geçirildi Son gözden geçirme:01.06.2017-04	Tüm içerik	06.11.2020	Bilge KAVİL YDYB Sorumlu Hemşiresi
Gözden Geçirme	Gözden geçirildi	Tüm içerik	10.11.2023	Bilge KAVİL YDYB Sorumlu Hemşiresi
HAZIRLAYAN		KALİTE SİSTEM ONAYI		ONAY
HEMŞİRELİK HİZMETLERİ DİREKTÖRÜ		KALİTE YÖNETİCİSİ		BAŞHEKİM

	KALİTE YÖNETİM DOKÜMANLARI	Doküman No : HB-TL-18 Yayın Tarihi :01.06.2013
	FOTOTERAPİ CİHAZI KULLANMATALİMATI	Revizyon No :00 Revizyon Tar.:... Sayfa No :1/1

1. AMAÇ VE KAPSAM

Kurumda kullanılan fototerapi cihazının standartlarını belirlemek ve uygulamaktır. Yenidoğan sarılığı tedavi sürecini kapsar.

2.TANIMLAR VE KISALTMALAR

LED : Işık Yayan Diyot

3. REFERANS DOKÜMANLAR

4.UYGULAMA

- Cihaz hasta odasına alınır ve fişe prize takılır.
- Cihazın ON/OFF düğmesine basılarak açılır, lambaları kontrol edilir.
- Fototerapi kot yatağın üst tarafına yerleştirilir.
- Fototerapi alacak bebeğin genel bakımı yapılır. Fototerapi almadan emmesi değerlendirilir. Giysileri çıkartılır sadece bezi kalır.
- Bebeğe fototerapi göz bandı takılır.
- Bebek kot yatağına fototerapi cihazının altına konur.
- Lambaların ışığının daha etkili olması için kot yatağının çevresi alüminyum folyo ile kapatılır.
- Belirli aralıklar ile bebeğin pozisyonu değiştirilir
- İşlem bittikten sonra fototerapi cihazın ON/OFF düğmesinden kapatılır.
- Fototerapinin fişi prizden çıkartılır.

4.1. Cihazın Temizliği

- Cihazın temizliği için kullanılan dezenfektan malzeme beze sıkılarak temizliği yapılır.

4.2.Cihaz Kalibrasyonu

- Tüm cihazlar HBYS'de demirbaş modülünde tanımlıdır. Kalibrasyon ve bakım planları bu modül üzerinden takip edilmektedir.

5.SORUMLULAR

Bu talimatın uygulanmasından yenidoğan takip ve tedavisini yapan hemşireler sorumludur.