

	KALİTE YÖNETİM DOKÜMANLARI	Doküman No : HB-TL-17 Yayın Tarihi :01.06.2013
	TÜNEL FOTOTERAPİ UYGULAMA(KULLANMA) TALİMATI	Revizyon No :00 Revizyon Tar:.... Sayfa No :1/1

Revizyon No	Yapılan Revizyon	Rev. Sayfası	Revizyon Tarihi	Revizyonu Yapan
Gözden Geçirme	Gözden Geçirildi. Son gözden geçirme:05.05.2017-04	Tüm sayfalar	06.11.2020	Bilge KAVİL YDYB Sorumlu Hemşiresi
Gözden Geçirme	Gözden Geçirildi.	Tüm sayfalar	15.11.2023	Bilge KAVİL YDYB Sorumlu Hemşiresi
HAZIRLAYAN		KALİTE SİSTEM ONAYI		ONAY
HEMŞİRELİK HİZMETLERİ DİREKTÖRÜ		KALİTE YÖNETİCİSİ		BAŞHEKİM

	KALİTE YÖNETİM DOKÜMANLARI	Doküman No : HB-TL-17 Yayın Tarihi :01.06.2013
	TÜNEL FOTOTERAPİ UYGULAMA(KULLANMA) TALİMATI	Revizyon No :00 Revizyon Tar:.... Sayfa No :1/1

1. AMAÇ VE KAPSAM

Kurumda kullanılan tünel fototerapi cihazının standartlarını belirlemek ve uygulamaktır. Yenidoğan sarılığı tedavisi sürecini kapsar.

2.TANIMLAR VE KISALTMALAR

3. REFERANS DOKÜMANLAR

4.UYGULAMA

- Cihaz hasta odasına alınır ve fişe takılır.
- Cihazın sağ tarafındaki açma/kapatma düğmesinden açılır.
- Cihazın sol tarafındaki ekran görüntüsüne gelir.
- Ekranın sağındaki yukarı aşağı düğmelerinden zaman ayarları yapılır.
 - Air Temp:Küvez ısısı
 - Skin Tep :Vücut ısısı
 - Treat Timer :Zaman ayarı
 - Lamps Timer :Florasınların kalan kullanım süresi
- Bebeğin sarılık durumuna(dr orduruna) göre ; cihazın sağ tarafındaki lamba düğmelerinden sağ taraftaki düğmeden 8 led,sol taraftaki düğmeye de basıldığında 16 led lamba aktif olur.
- Bebeğin elbiseleri çıkartılır sadece bezi kalır.
- Fototerapi ısı probu bebeğin altına yerleştirilir ve göz bandı takılarak tünel fototerapi cihazın içine konur.
- Kapak kapatılır.
- Start /stop düğmesine basılarak işleme başlanır.
- Bebek emzirmek için çıkartıldığında start/stop düğmesine basılır üst kapak açılır bebek çıkartılır.

4.1.Cihazın Temizliği

Cihazın temizliği için kullanılan dezenfektan malzeme beze sıkılarak her kullanım sonrası temizliği yapılır.

4.2.Cihaz Kalibrasyonu

- Tüm cihazlar HBYS'de demirbaş modülünde tanımlıdır. Kalibrasyon ve bakım planları bu modül üzerinden takip edilmektedir.

5.SORUMLULAR

Bu talimatın uygulanmasından yenidoğan takip ve tıdavisini yapan tüm hemşireler sorumludur.