

Revizyon No	Yapılan Revizyon	Rev. Sayfası	Revizyon Tarihi	Revizyonu Yapan
Gözden Geçirme	Gözden geçirildi. Son gözden geçirme:06.11.2017	Tüm içerik	06.11.2020	Özgür GÜNER Sorumlu Fizyoterapist
Gözden Geçirme	Gözden geçirildi.	Tüm içerik	20.11.2023	Özgür GÜNER Sorumlu Fizyoterapist
HAZIRLAYAN		KALİTE SİSTEM ONAYI		ONAY
FİZYOTERAPİST		KALİTE YÖNETİCİSİ		BAŞHEKİM

	KALİTE YÖNETİM DOKÜMANLARI	Doküman No : HB-TL-13 Yayın Tarihi :23.11.2012 Revizyon No :00 Revizyon Tar:.... Sayfa No :1/1
	ULTRASON CİHAZI KULLANMA TALİMATI	

1. AMAÇ VE KAPSAM

Kurumda ultrason cihazının kullanımı ile ilgili standartları belirlemek ve uygulamaktır. FTR Ünitesindeki işleyiş sürecini kapsar.

2.TANIMLAR VE KISALTMALAR

FTR :Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

HBYS :Hastane Bilgi Yönetim Sistemi

3. REFERANS DOKÜMANLAR

FTR Ünitesi Temizlik Kontrol Formu

Dezenfektan Kullanım Listesi

4.UYGULAMA

- El-el bileği hastaları dışındakiler, hasta mahremiyetine uygun olarak kapalı kabinlerde tedaviye alınır.
- Cihaz toprak hatlı prize takılır.
- Hasta tedavi yapılacak bölgesi açıkta kalacak şekilde giysilerini çıkarır.
- Tedavi yapılacak alandaki tüyler fazlaysa temizlenmiş olmalıdır.
- Hasta tedavisine uygun olarak tekerleksiz sandalyede oturur ya da sabit sedyeyi kullanır.
- Saç tedavi için engel teşkil edecekse hasta bone kullanır.
- Cihazın uygun programı seçilir. Yapılmak istenen tedaviye göre akım şiddeti ve süresi ayarlanır.
- Az miktarda jel tedavi bölgesine sıkılır, tedavi başlatılır.

4.1.Cihazın Temizliği

- Tedavi sonunda jel kağıt peçete ile temizlenir. Prob başlığı uygun ile silinir,yerine konur.
- Cihaz temizliği FTR Ünitesi Temilik Kontrol Formu'na göre yapılır.

4.2.Cihaz Kalibrasyonu

Tüm cihazlar HBYS'de demirbaş modülünde tanımlıdır. Kalibrasyon ve bakım planları bu modül üzerinden takip edilmektedir.

5.SORUMLULAR

Bu talimatın uygulanmasından tüm fizyoterapistler ve fizil tedavi teknikerleri sorumludur.