

Revizyon No	Yapılan Revizyon	Rev. Sayfası	Revizyon Tarihi	Revizyonu Yapan
01	4. Kısım uygulamaları değişikliği.		04.03.2011	Eğt. Hemş. Melek KAYA
02	Kan takip defterlerinin çıkarılması pnömatik tüplerinin temizliği ile ilgili bilgi eklenmesi.		23.12.2014	Hem. Hiz. Direk. Sevda SÜMBÜL
Gözden geçirme	Gözden geçirildi. Son Gözden Geçirildi:16.04.2017-08	Tüm sayfalar	15.10.2020	Ali Bıyık Teknik Servis Sorumlusu
Gözden geçirme	Gözden geçirildi	Tüm sayfalar	18.10.2023	Kemal YILDIRIM Teknik Servis Sorumlusu
HAZIRLAYAN		KALİTE SİSTEM ONAYI	ONAY	
TEKNİK SERVİS SORUMLUSU		KALİTE YÖNETİCİSİ	BAŞHEKİM	

1. AMAÇ VE KAPSAM

Bu talimatın amacı; kurumda pnömatik sistem sayesinde hasta örneklerinin güvenli bir şekilde laboratuara gönderilmesini sağlamak, sonuçların ve diğer malzemenin hastane içinde hızlı taşınmasını sağlamak ve kontaminasyonları önlemektir. Pnömatik sistemlerin kullanıldığı tüm süreçleri kapsar.

2.TANIMLAR VE KISALTMALAR**3. REFERANS DOKÜMANLAR**

Pnömatik Temizlik Çizelgesi

4. UYGULAMA

Göndermek istediğiniz nesneyi hazırlayınız. Hazırlanan nesneyi taşıyıcı tüpün içine yerleştiriniz ve kapağını kapatınız. Taşıyıcı tüpün içine konulan nesnenin içerisinde bulunan maddenin akma veya dökülme riski varsa, gönderilecek nesnenin kapağının sıkıca kapatılmasına dikkat ediniz ve taşıyıcı tüpün içerisine sabitleme aparatı ile sabitleyiniz. Kapağın sıkıca kapatıldığının kontrolünü yapınız. Kontrol paneli üzerinden nesneyi göndermek istediğiniz istasyonun numarasını tuşlayınız. Ardından 'OK' tuşuna basınız

4.1. Pnömatik Sistem İstasyon Kullanımı Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar

- Taşıyıcı tüpü istasyonun üst kısmında bulunan gönderme kanalına düzgün olarak yerleştiriniz. Yerleştirdiğiniz taşıyıcı tüpü bastırarak zorlamayınız.
- İstasyonun kontrol paneli üzerinde önce yeşil, sonra yeşil ve sarı ışık beraber yanacak ve sistem gönderime başlayacaktır. Başka herhangi bir tuşa basmayınız.
- Gönderme işlemi yapılmayacak ise Taşıyıcı Tüpleri gönderme kanalına koymayınız ve tuşlara basmayınız.
- İstasyonların altlarındaki sepetlere sistem harici eşya vb koymayınız. Sepette biriken tüpleri zamanında alınız.
- Kontrol paneli üzerinde kırmızı ışık yanıyor ise istasyon arızalı demektir. Bu sırada gönderdiğiniz taşıyıcı tüpler son istasyon olan 2.Bina 6.kattaki istasyona düşecektir.
- Arıza devam ediyorsa, sorun Teknik Servise bildirilir.

4.2. Pnömatik Sistem Temizliği ve Bakımı

- Taşıma sisteminde kullanılan kapsüller yüksek düzey dezenfektan ile haftada bir silinir. Yapılan temizlik Pnömatik Temizlik Çizelgesi ile kayıt altına alınır.
- Gün içinde kirlenen kapsüller hazırlanan klor tabletli su ile silinir. Temizlenmeden taşıma/yollama işinde kullanılmaz.
- Herhangi bir nedenle içinde tüp kırılan kapsül eldiven giyilerek açılır, cam parçaları bir pens yardımıyla toplanır ve tıbbi atık kutusuna atılır, kapsülün içi uygun dezenfektan ile dezenfekte edilir ve tamamen kuruduktan sonra yeniden kullanılır.
- Pnömatik sisteminin bakımı, ilgili firma tarafından yapılarak HBYS üzerinde Demirbaş Yönetimi

	KALİTE YÖNETİM DOKÜMANLARI	Dok.No : OH-TL-25 Yayın Tarihi :01.03.2009
	PNÖMATİK SİSTEMİ KULLANIM VE TEMİZLİK TALİMATI	Revizyon No :02 Revizyon Tar.:23.12.2014 Sayfa No :3/3

modülüne kaydedilir.

5.SORUMLULAR

Bu talimatın uygulanmasından pnömatik sistemini kullanan tüm çalışanlar ve temizliğinden Destek Hizmetler Yöneticisi sorumludur.