

	KALİTE YÖNETİM DOKÜMANLARI	Dok.No : BL-TL-12 Yayın Tarihi :30.11.2011 Revizyon No :04 Revizyon Tar.:02.02.2021 Sayfa No :1/2
	SEDİMENTASYON CİHAZI KULLANMA TALİMATI	

Revizyon No	Yapılan Revizyon	Revizyon Sayfası	Revizyon Tarihi	Revizyonu Yapan
01	Test ve hasta girişinin yapılması ile ilgili bilgi ilavesi.	2.sayfa	01.10.2013	Hem. Hiz. Sevda SÜMBÜL
02	Sedimentasyon cihazının değişmesi nedeniyle uygulama kısmı değiştirilmiştir.	2. sayfa	27.11.2018	Emine EREN Laboratuvar Sorumlu Teknisyeni
03	Sedimentasyon cihazının değişmesi nedeniyle talimat içeriği revize edilmiştir	Tüm sayfalar	02.10.2020	Emine EREN Laboratuvar Sorumlu Teknisyeni
04	Sedimentasyon cihazının değişmesi nedeniyle uygulama kısmı değiştirilmiştir.	2. sayfa	02.02.2021	Emine EREN Laboratuvar Sorumlu Teknisyeni
Gözden Geçirme	Gözden geçirildi.	Tüm sayfalar	10.02.2024	Mesut ÖZDEMİR Laboratuvar Sorumlusu
HAZIRLAYAN		KALİTE SİSTEM ONAYI		ONAY
LABORATUVAR SORUMLU TEKNİSYENİ		KALİTE YÖNETİCİSİ		BAŞHEKİM

OPTIMED	KALİTE YÖNETİM DOKÜMANLARI	Dok.No : BL-TL-12 Yayın Tarihi :30.11.2011 Revizyon No :04 Revizyon Tar.:02.02.2021 Sayfa No :2/2
	SEDİMENTASYON CİHAZI KULLANMA TALİMATI	

1. AMAÇ VE KAPSAM

Bu talimatın amacı laboratuvarda bulunan sedimentasyon cihazını doğru ve verimli kullanımını sağlamaktır. MIXRATE-X100 sedimentasyon cihazının kullanım süreçlerini kapsar.

2. TANIMLAR VE KISALTMALAR

-

3. REFERANS DOKÜMANLAR

Cihaz Yönetimi Prosedürü

4. UYGULAMA:

Laboratuvarda bulunan MIXRATE-X100 sedimentasyon cihazını kullanmadan önce; cihazın gerektirdiği şekilde kurulmuş ve bağlanmış olduğunu kontrol etmek gerekmektedir. Sedim cihazı arka kısımda bulunan power düğmesinden açılır.

4.1.Numune Alımı

Sodyum sitrat siyah kapaklı tüpün iki çizgi arasında numune alınır.

4.2.Test Yükleme

Çalışılacak sedim numuneleri için ana ekranda 1 yani pat.ıd basılır. Daha sonra tekrar 1'e yani pat. ıd auto' ya basılır.

Barkod numarası yazılıp enter a basıldıktan sonra numune kuyucuğa konur ve esc tuşuna basılır.

4.3. Geçmiş Hasta Sonucu Görüntüleme

Ana menü üzerinden 2 numara yan data basılıp çıkan ekrandan 1 working list tuşuna basılır ve hasta barkodu görüntülenir.

5.SORUMLULAR

Bu talimatın uygulanmasından Laboratuvar sorumlu Hekimi, Laboratuvar Sorumlu teknisyeni ve laboratuvar çalışanları sorumludur.