

OPTİMED	KALİTE YÖNETİM DOKÜMANLARI	Doküman No:HB-TL-61 Yayın Tarihi :01.12.2017
	3T ISITICI SOĞUTUCU KULLANIM TALİMATI	Revizyon No :00 Revizyon Tar:... Sayfa No :1/3

Revizyon No	Yapılan Revizyon	Rev. Sayfası	Revizyon Tarihi	Revizyonu Yapan
Gözden Geçirme	Gözden Geçirildi	Tüm sayfalar	08.07.2019	Burak ÖZER Perfüzyonist
Gözden Geçirme	Gözden Geçirildi	Tüm sayfalar	10.07.2022	Burak ÖZER Perfüzyonist

HAZIRLAYAN	KALİTE SİSTEM ONAYI	ONAY
PERFÜZYONİST	KALİTE YÖNETİCİSİ	BAŞHEKİM

	KALİTE YÖNETİM DOKÜMANLARI	Doküman No:HB-TL-61 Yayın Tarihi :01.12.2017
	3T ISITICI SOĞUTUCU KULLANIM TALİMATI	Revizyon No :00 Revizyon Tar:.... Sayfa No :2/3

1. AMAÇ VE KAPSAM

Bu prosedürün amacı; 3T ısıtıcı, soğutucu cihazının kullanımı için uygulanacak standart işlemlerin belirlenmesidir. Cihaz kullanımını gerektiren tüm süreçleri kapsar.

2.TANIMLAR VE KISALTMALAR

3.REFERANS DOKÜMANLAR

4. UYGULAMA

- Cihazın fişi ups güç sistemi bağlı prize takılır
- Power tuşu ile sistem açılışı yapılır
- İçerisindeki su miktarı kontrol bölümünden kontrol edilir eksiğe cihazın üstünde bulunan su ekleme kapağından su eklenir
- Blanket cerrahi masaya serilir ve 2 numaralı pompa kolu açık hale getirilip kalp akciğer makinesindeki dokunmatik ekrandan 1 numaralı dokunmatik ekrandan 2 numaralı ısıtıcı/soğutucu pompa düğmesine basılarak blanket 36-38°C ısıtılır
- Hasta ekstra korporeal dolaşıma girmeden sistem sıcaklığı 34 °c ' ye ayarlanır oksijenatöre bağlı olan 1 numaralı hatta ait pompa kolu açık hale getirilip ısıtma/soğutma sistemi kalp akciğer makinesi üzerindeki 1 numaralı dokunmatik ekrandan 1 numaralı ısıtıcı/soğutucu pompa düğmesine basılarak çalıştırılır
- Kardiyopleji pompa sistemi bağlantıları yapıldıktan sonra, sistem ısısı kalp akciğer makinesindeki 1 numaralı dokunmatik ekrandan kardiyopleji ısıtma düğmesine basılıp 4 °c ayarlanıp ısıtıcı/soğutucu arkasında bulunan kol açık hale getirilip ısıtma/soğutma işlemi başlatılır
- Ekstra korporeal sirkülasyon tamamlanıp hasta yoğun bakıma alındıktan sonra ısıtıcı/soğutucu arkasındaki kollar sistemler çalışır halde iken kapalı hale getirilip hatlardaki suyun sisteme geri çekme işlemi tamamlanıp 1. 2. ve kardiyopleji sistemi düğmelerine pompa üzerindeki 1 numaralı ekrandan basılarak sistem kapatılır
- Sistem power off hale getirilir
- Sistem yüzey temizliği yapılarak üzeri örtülür
- Uygun haftalık, aylık, 3 aylık temizlik ve bakım talimatlarına uyulur.

5.SORUMLULAR

HAZIRLAYAN	KALİTE SİSTEM ONAYI	ONAY
PERFÜZYONİST	KALİTE YÖNETİCİSİ	BAŞHEKİM

OPTiMED	KALİTE YÖNETİM DOKÜMANLARI	Doküman No:HB-TL-61 Yayın Tarihi :01.12.2017
	3T ISITICI SOĞUTUCU KULLANIM TALİMATI	Revizyon No :00 Revizyon Tar:... Sayfa No :3/3

Bu prosedürün uygulanmasından perfüzyonist sorumludur.

HAZIRLAYAN	KALİTE SİSTEM ONAYI	ONAY
PERFÜZYONİST	KALİTE YÖNETİCİSİ	BAŞHEKİM