

	KALİTE YÖNETİM DOKÜMANLARI	Doküman No : BL-TL-13 Yayın Tarihi :05.10.2013 Revizyon No :00 Revizyon Tar:.... Sayfa No :1/1
	COBAS E411 HORMON CİHAZI KULLANIM TALİMATI	

Revizyon No	Yapılan Revizyon	Rev. Sayfası	Revizyon Tarihi	Revizyonu Yapan
Gözden Geçirme	Gözden Geçirildi	Tüm sayfalar	20.05.2020	Emine EREN Laboratuvar Sorumlu Teknisyeni
Gözden Geçirme	Gözden Geçirildi.	Tüm sayfalar	01.06.2023	Mesut ÖZDEMİR Laboratuvar Sorumlu Teknisyeni
HAZIRLAYAN		KALİTE SİSTEM ONAYI	ONAY	
LABORATUVAR SORUMLU DOKTORU		KALİTE YÖNETİCİSİ	BAŞHEKİM	

	KALİTE YÖNETİM DOKÜMANLARI	Doküman No : BL-TL-13 Yayın Tarihi :05.10.2013 Revizyon No :00 Revizyon Tar:.... Sayfa No :2/1
	COBAS E411 HORMON CİHAZI KULLANIM TALİMATI	

1. AMAÇ VE KAPSAM

Bu talimatın amacı Optimed Hastanesinde, laboratuvarda bulunan hormon cihazının kullanımında ve bakımında dikkat edilecek hususları belirtmektedir. Laboratuvar hizmetleri süreçlerini kapsar.

2. TANIMLAR VE KISALTMALAR

OH : Optimed Hastanesi

3. REFERANS DOKÜMANLAR

Cihaz Sicil Kartı

4. UYGULAMA:

Laboratuvarda bulunan hormon cihazını kullanmadan önce; cihazın gerektirdiği şekilde kurulmuş ve bağlanmış olduğunu kontrol etmek gerekmektedir.

4.1. Günlük Bakım-Sabah

- Öncelikle şu işlemler yapılır;
 - Cihaz , pipet, distile su, procell, cleancell solüsyonları tamamlanır.
 - Maintenance-sipper pipetter prime işaretlenir. Select tıklanarak sayı girilir. (10 kez) start tuşuna basılır.
 - Maintenance-R/R pipetter prime işaretlenir. Select tıklanarak sayı girilir. (10 kez) start tuşuna basılır.
 - Maintenance-measuring ceel prepaton işaretlenir. Select basılır girilir. (1 kz) start tuşuna basılır..

4.2. Hasta Girişi

- Ana menüden work place seçilir.
- Ekrana gelen Sample ID yazan yere hasta barkod numarası girilir.
- Rack no yazan yere rack numarası ve pozisyon yazılarak istenilen testler işaretlenir ev save basılır.
- Cihaz barkod okuduğu için hasta tüplerinin çoğu barkotla cihaza yüklenir. Cihaz çalışılacak testleri sistemden otomatik çeker.
- Cihaza hasta yükleme yapıldığı zaman bir süre sonra cihaz kendini finalization yaparak çalışmaya hazır hale getirir.

5. SORUMLULAR

Talimatın uygulanmasından tüm laboratuvar teknisyenleri sorumludur.