

	KALİTE YÖNETİM DOKÜMANLARI	Dok.No : AH-TL-06 Yayın Tarihi :04.01.2016
OPTİMED	CERRAHİ MOTOR KULLANIM TALİMATI	Revizyon No : 00 Revizyon Tar.... Sayfa No :1/3

Revizyon No	Yapılan Revizyon	Rev. Sayfası	Revizyon Tarihi	Revizyonu Yapan
Gözden Geçirme	Gözden geçirildi. Son gözden geçirme tarihi: 02.05.2017-01	Tüm sayfalar	29.01.2020	Hasan Coşkun Ameliyathane Sorumlu Hemşiresi
Gözden Geçirme	Gözden geçirildi.	Tüm sayfalar	10.02.2023	Hasan COŞKUN Ameliyathane Sorumlu Hemşiresi
HAZIRLAYAN		KALİTE SİSTEM ONAYI		ONAY
AMELİYATHANE SORUMLU HEMŞİRESİ		KALİTE YÖNETİCİSİ		BAŞHEKİM

	KALİTE YÖNETİM DOKÜMANLARI	Dok.No : AH-TL-06 Yayın Tarihi :04.01.2016
OPTİMED	CERRAHİ MOTOR KULLANIM TALİMATI	Revizyon No : 00 Revizyon Tar:... Sayfa No :2/3

1. AMAÇ VE KAPSAM

Bu talimatın amacı Cerrahi delici ve kesici motorların nasıl kullanılacağını belirlemektir. Cerrahi delici ve kesici motorların kullanımı sürecini kapsar.

2.TANIMLAR VE KISALTMALAR

OH : Optimed Hastanesi

3. REFERANS DOKÜMANLAR

4.UYGULAMA

4.1.Sorumlular:

Bu talimatın uygulanmasından ilgili hekimler ve ameliyathane hemşireleri sorumludur.

4.2.Uygulama Esasları

Cerrahi motorlar kesici ve delici olmak üzere ikiye ayrılır. Motorlar pilli olup pil yatağı kapağı açılıp pil kanala uygun gelecek şekilde yerleştirildikten sonra pil kapağı kapatılır. Piller kendi şarj cihazında şarj edilir. Delici motor, kanül motor (içi delik motor) olup, içine uzun dril k teli, stehman vs. takılmaya uygundur. Delici motora takılacak olan motorun uç kısmını tam ortalayacak şekilde takılır ve kendi anahtarı ile sıkıştırılır. Delici uç sağ veya sol yöne değiştirmek istendiğinde motorun arka kısmından çevrilerek değişim yapılır. Motoru çalıştırmak için çalıştırma butonuna basılarak çalıştırılır çalışma hızı basarak manuel olarak ayarlanır.



Kesici motorlar ise sadece kendisine ait olan kesme bıçakları takılır. Bıçağın takma yeri motorun bıçak takılacak kısmına yerleştirilir butona basılarak takma işlemi gerçekleştirilir. Motoru çalıştırmak için basma butonuna basılır ve kesme hızı çalıştırma butonuna basarak manuel olarak ayarlanır. Kesici ve delici alet

	KALİTE YÖNETİM DOKÜMANLARI	Dok.No : AH-TL-06 Yayın Tarihi :04.01.2016
OPTİMED	CERRAHİ MOTOR KULLANIM TALİMATI	Revizyon No : 00 Revizyon Tar:... Sayfa No :3/3

yaralanmalarından korunmak için motor çalışma esnasında el ile tutulunca çalışmaz.



4.3.Cihaz Temizliği

Motorların temizliği ıslak dezenfektanlı bezlerle yapılır ve kurulanır. Pil yataklarının içi ıslatılmaz. Sterilizasyon işlemli buharlı otoklavda 134 derece steril edilir.



Pil

şarj cihazı

5.SORUMLULAR

Bu talimatın uygulanamsından ameliyathane çalışanları ve hekimler sorumludur.