

|                                                                                  |                                      |                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | KALİTE YÖNETİM DOKÜMANLARI           | Dok.No : TH-TL-08<br>Yayın Tarihi :01.12.2015<br>Revizyon No :01<br>Revizyon Tar.14.05.2012<br>Sayfa No :1/2 |
|                                                                                  | KAN SAKLAMA DOLABI KULLANMA TALİMATI |                                                                                                              |

| Revizyon No                    | Yapılan Revizyon                                                                                                                    | Rev. Sayfası        | Revizyon Tarihi | Revizyonu Yapan                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------------------------------------------|
| 01                             | Uygulama kısmında 'alkol ve antibiyotik kullanıp kullanılmadığı genel bir rahatsızlığı olup olmadığı olacak biçimde değiştirilmeli. |                     | 14.05.2012      | KTM Burcu ÇAĞLAR                                    |
| Gözden Geçirme                 | Gözden Geçirildi<br>Son Gözden Geçirme:06.02.2018-03                                                                                | Tüm İçerik          | 10.12.2019      | Burcu KAHRAMAN<br>Transfüzyon Sorumlu<br>Teknisyeni |
| Gözden Geçirme                 | Gözden Geçirildi.                                                                                                                   | Tüm İçerik          | 05.12.2022      | Burcu KAHRAMAN<br>Transfüzyon Sorumlu<br>Teknisyeni |
|                                |                                                                                                                                     |                     |                 |                                                     |
|                                |                                                                                                                                     |                     |                 |                                                     |
|                                |                                                                                                                                     |                     |                 |                                                     |
|                                |                                                                                                                                     |                     |                 |                                                     |
|                                |                                                                                                                                     |                     |                 |                                                     |
| HAZIRLAYAN                     |                                                                                                                                     | KALİTE SİSTEM ONAYI | ONAY            |                                                     |
| LABORATUVAR SORUMLU<br>DOKTORU |                                                                                                                                     | KALİTE YÖNETİCİSİ   | BAŞHEKİM        |                                                     |

|                                                                                  |                                      |                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | KALİTE YÖNETİM DOKÜMANLARI           | Dok.No : TH-TL-08<br>Yayın Tarihi :01.12.2015<br>Revizyon No :01<br>Revizyon Tar.14.05.2012<br>Sayfa No :2/2 |
|                                                                                  | KAN SAKLAMA DOLABI KULLANMA TALİMATI |                                                                                                              |

## 1. AMAÇ VE KAPSAM

Bu talimatın amacı kurumda kullanılan transfüzyon merkezi kan saklama dolabının nasıl kullanılacağını ve dikkat edilecek hususları belirtmektedir. Transfüzyon işleyiş sürecini kapsar.

## 2. TANIMLAR VE KISALTMALAR

KTM:Kan Transfüzyon Merkezi

HBYS:Hastane Bilgi Yönetim Sistemi

## 3.REFERANS DOKÜMANLAR

Her cihaz için HBYS'de malzeme yönetimi modülünde bulunmaktadır.Modülde, arıza talep formları, servis belgeleri vb. evrakları ile kalibrasyon ve bakım planları ile kayıtları bulunmaktadır. Cihazların arıza, bakım vb. kayıtları bu modüle işlenmektedir.

KTM cihazlarının üzerine kan, diğer vücut salgıları veya kimyasalların dökülmesi halinde bu cihazların temizlik ve dezenfeksiyonundan cihaz sorumlusu laboratuvar teknikerleri sorumludur. Dezenfeksiyon gerekmeyen durumlarda bu yüzeyler cihazların bakım talimatlarında belirtildiği üzere temizlenir.

## 4. UYGULAMA:

- EMSAS Marka EKN- tipinde kan saklama dolabı kullanılmaktadır.
- Uyarı sistemli dereceye sahiptir.
- Ayrıca kan saklama dolabında kuruma ait ikinci bir derece ile ölçüm yapıp kontrolü yapılmaktadır.
- Kan dolabında Kızılay Kan Merkezi'nden gelen E.S.grup grup ayrılarak, muhafaza edilmektedir.
- Sıcaklık aralığı 0 ile 4 derece arasında olmalıdır.
- Ayrıca hastanemizde de torbalanan kanlar bu dolapta muhafaza edilmektedir.

### 4.1.Temizlik

KTM cihazlarının üzerine kan, diğer vücut salgıları veya kimyasalların dökülmesi halinde bu cihazların temizlik ve dezenfeksiyonundan cihaz sorumlusu laboratuvar teknikerleri sorumludur. Dezenfeksiyon gerekmeyen durumlarda bu yüzeyler cihazların bakım talimatlarında belirtildiği üzere temizlenir.

## 5.SORUMLULAR

Bu talimatın uygulanmasından transfüzyon merkezi sorumlu hekimi, sorumlu teknisyeni sorumludur.