

Revizyon No	Yapılan Revizyon	Rev. Sayfası	Revizyon Tarihi	Revizyonu Yapan
Gözden Geçirme	Gözden Geçirildi Son Gözden Geçirme:06.11.2018-06	Tüm İçerik	30.11.2019	Sevda SÜMBÜL Hemşirelik Hizmetleri Direktörü
Gözden Geçirme	Gözden Geçirildi.	Tüm İçerik	01.12.2022	Sevda SÜMBÜL Hemşirelik Hizmetleri Direktörü

HAZIRLAYAN	KALİTE SİSTEM ONAYI	ONAY
ENFEKSİYON KONTROLÜ VE ÖNLENMESİ KURULU	KALİTE YÖNETİCİSİ	BAŞHEKİM

	KALİTE YÖNETİM DOKÜMANLARI	Doküman No : HE-TL-04 Yayın Tarihi :21.11.2012 Revizyon No :00 Revizyon Tar:... Sayfa No :1/1
	ETÜV KULLANMA TALİMATI	

1. AMAÇ VE KAPSAM

Kurumda Diş polikliniğinde etüvün nasıl ve hangi metodlarda çalışacağının belirlenmesidir.Tün hasta bakım sürecini kapsar.

2.TANIMLAR VE KISALTMALAR

OH : Optimed Hastanesi

3. REFERANS DOKÜMANLAR

Kalibrasyon Planı

El Yıkama ve Eldiven Giyme Talimatı

Dezenfektan Kullanım Listesi

Cihaz Sicil Kartı

4.UYGULAMA

- Cihazın fişi topraklı prize takılır.
- Cihazın açma/kapama anahtarı açılır.
- Eller, El Yıkama ve Eldiven Giyme Talimatına uygun olarak yıkanır ve eldiven giyilir.
- Aletler kullanıldıktan sonra su altında kaba kirlerinden temizlenir sonra enzimatik temizleyici solüsyonda 15 dakika (ilgili firma önerisine göre süre ayarlanır) bekledikten sonra aletler su ile durulanır ve aletler kurulanır.
- Sterilizasyon işlemi için aletler cihazın hücreğine yerleştirilir.
- Cihazın hücre kapağı kapatılır.
- Steril edilecek alet ve malzemelerin özelliğine göre ısı derecesi ve zaman ayarlaması yapılır.
- Cihaz 200 derecede ve 30-40dakikada alet ve malzemeler steril edilir.
- Steril olan malzemeler hücreden alınır, kapağı kapatılır.
- Tekrar sterilizasyon işlemi yapılacaksa yukarıdaki işlem basamakları aynen tekrarlanır.
- Cihazın açma /kapama anahtarından kapatılır.
- Cihazların arıza, bakım vb. kayıtları Cihaz Sicil Kartına işlenmektedir.
- Cihazın kalibrasyonu yılda bir defa Yıllık Kalibrasyon Planına göre yapılır .

4.1. Temizliği

- Cihaz temiz, yumuşak , kuru bez yardımıyla Dezenfektan Kullanım Listesinde belirtilen uygun bir dezenfektanlı bez ile silinir. Cihaz üzerine direkt olarak dezenfektan maddesi kullanılmaz.

5.SORUMLULAR

Süreç ile ilgili sağlık personelinin kapsar.