



KALİTE YÖNETİM DOKÜMANLARI

KOMBİNE ELEKTROTERAPİ
KULLANMA TALİMATI

Doküman No : HB-TL-15
Yayın Tarihi :23.11.2012
Revizyon No :00
Revizyon Tar:...
Sayfa No :1/2

Revizyon No	Yapılan Revizyon	Rev. Sayfası	Revizyon Tarihi	Revizyonu Yapan
Gözden Geçirme	Gözden Geçirildi Son Gözden Geçirme:06.11.2018-06	Tüm İçerik	25.11.2019	Özgür GÜNER Fizik Tedavi Sorumlu Teknisyeni
Gözden Geçirme	Gözden Geçirildi.	Tüm İçerik	26.11.2022	Özgür GÜNER Fizik Tedavi Sorumlu Teknisyeni
HAZIRLAYAN		KALİTE SİSTEM ONAYI	ONAY	
FİZYOTERAPİST		KALİTE YÖNETİCİSİ	BAŞHEKİM	

	KALİTE YÖNETİM DOKÜMANLARI	Doküman No : HB-TL-15 Yayın Tarihi :23.11.2012 Revizyon No :00 Revizyon Tar.:... Sayfa No :1/2
	KOMBİNE ELEKTROTERAPİ KULLANMA TALİMATI	

1. AMAÇ VE KAPSAM

Elektroterapi cihazlarının (sabit-taşınabilir) kullanımı ile ilgili standartları belirlemek ve uygulamaktır. Fizik tedavi ve rehabilitasyon sürecini kapsar.

2.TANIMLAR VE KISALTMALAR

FTR :Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

HBYS :Hastane Bilgi Yönetim Sistemi

3. REFERANS DOKÜMANLAR

Dezenfektan Kullanım Listesi

Cihaz Yönetimi Prosedürü

4.UYGULAMA

- El-el bileği hastaları dışındakiler, hasta mahremiyetine uygun olarak kapalı kabinlerde tedaviye alınır.
- Sabit cihazlar toprak hatlı prize takılır, taşınabilir cihazların yeterli şarjı olmalıdır.
- Hasta tedavi yapılacak bölgesi açıkta kalacak şekilde giysilerini çıkarır.
- Tedavi yapılacak alandaki tüyler fazlaysa temizlenmiş olmalıdır.
- Hasta tedavisine uygun olarak tekerleksiz sandalyede oturur ya da sabit sedyeyi kullanır.
- Saç tedavi için engel teşkil edecekse hasta bone kullanır.
- Yapışkanlı elektrot kullanılacaksa elektrot paketine hastanın bilgileri kaydedilir, seansları bitene kadar bu elektrotlar kullanılır.
- Yapışkanlı elektrotlar hastaya sabitleme bandajı ile sabitlenir. Plak elektrot kullanılacaksa, elektrot süngerleri dezenfektanlı su ile Dezenfektan Kullanım Listesine göre ıslatılır.
- Plak elektrotlar deriyle arada en az iki kat sünger kalacak şekilde, kablo bağlantıları üstte olacak şekilde velcro ile sabitlenir.
- Cihazın uygun programı seçilir. Yapılmak istenen tedaviye göre akım şiddeti ve süresi ayarlanır ve tedavi başlatılır.
- Acil durum çağrı butonu hastanın ulaşabileceği şekilde yanında bulundurulur.
- Tedavi sonunda elektrotlar paketine konur, kablolar askılarına takılır.

4.1. Temizliği

- Cihaz temizliği Cihaz Yönetimi Prosedürü'ne göre yapılır.

4.2. Cihaz Kalibrasyonu

Tüm cihazlar HBYS'de demirbaş modülünde tanımlıdır. Kalibrasyon ve bakım planları bu modül üzerinden takip edilmektedir.

	KALİTE YÖNETİM DOKÜMANLARI	Doküman No : HB-TL-15 Yayın Tarihi :23.11.2012 Revizyon No :00 Revizyon Tar:... Sayfa No :1/2
	KOMBİNE ELEKTROTERAPİ KULLANMA TALİMATI	

5.SORUMLULAR

Bu talimatın uygulanmasından Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı, Fizik Tedavi Teknistenleri ve teknikerleri sorumludur.