

	KALİTE YÖNETİM DOKÜMANLARI	Doküman No : HB-TL-43 Yayın Tarihi :25.11.2012 Revizyon No :00 Revizyon Tar:.... Sayfa No :1/1
	ESWT CİHAZI KULLANMA TALİMATI	

Revizyon No	Yapılan Revizyon	Rev. Sayfası	Revizyon Tarihi	Revizyonu Yapan
Gözden Geçirme	Gözden Geçirildi Son Gözden Geçirme:06.11.2018-06	Tüm İçerik	20.11.2019	Sevda SÜMBÜL Hemşirelik Hizmetleri Direktörü
Gözden Geçirme	Gözden Geçirildi	Tüm İçerik	25.11.2022	Sevda SÜMBÜL Hemşirelik Hizmetleri Direktörü
HAZIRLAYAN		KALİTE SİSTEM ONAYI	ONAY	
FİZYOTERAPİST		KALİTE YÖNETİCİSİ	BAŞHEKİM	

	KALİTE YÖNETİM DOKÜMANLARI	Doküman No : HB-TL-43 Yayın Tarihi :25.11.2012 Revizyon No :00 Revizyon Tar:.... Sayfa No :1/1
	ESWT CİHAZI KULLANMA TALİMATI	

1. AMAÇ VE KAPSAM

Bu talimatın amacı; kurumda bulunun ESWT cihazının uygun kullanımını ile ilgili standartları belirlemek ve uygulamaktır.Hasta bakım sürecini kapsar.

2. TANIMLAR VE KISALTMALAR

OH : Optimed Hastanesi
ESWT : Extracorporeal Shock Wave Therapy

3. REFERANS DÖKÜMANLAR:

Eldiven Kullanma ve El Yıkama Talimatı

Dezenfektan Kullanım Listesi

Cihaz Sicil Kartı

4. UYGULAMA:

- İşlem öncesi eller Eldiven Kullanma ve El Yıkama Talimatına uygun olarak yıkanır kurulanır ve el dezenfektanı ile el hijyeni sağlanır.
- İşlem sırasında temiz nonsteril eldiven giyilebilir.
- Cihazın fişi topraklı prize takılır.
- Cihaz açma/kapama düğmesine basılarak cihaz açılır.
- Hastaya uygun pozisyon verilir.
- Tedavi yapılacak bölge açık kalacak şekilde giysileri çıkarılır.
- Uygulanacak tedavi ve bölgeye göre ;
 - Basınç
 - Frekans
 - Atım sayısı ayarları yapılır.
- Kullanılacak başlık için jel kullanılır. Tedavi bölgesine jel sürülür.
- Jelin temizliği kuru peçete ile yapılır.
- Tetik veya pedal ile işleme başlanır.
- Tedavi kaslı yüzey üzerinden yapılır.
- Kemik yüzeylere uygulanmamalıdır.
- Uygulama sonunda deri hassasiyetini azaltmak için COLDPACK uygulanır.

4.1.Temizliği

- Cihazın temizliği yapılmadan önce fişi prizden çıkarılır.
- İşlem öncesi eller Eldiven Kullanma ve El Yıkama Talimatına uygun olarak yıkanır kurulanır ve el dezenfektanı ile el hijyeni sağlanır.
- İşlem sırasında temiz nonsteril eldiven giyilebilir.

	KALİTE YÖNETİM DOKÜMANLARI	Doküman No : HB-TL-43 Yayın Tarihi :25.11.2012 Revizyon No :00 Revizyon Tar:.... Sayfa No :1/1
	ESWT CİHAZI KULLANMA TALİMATI	

- Cihazın temizliği nemli bir bez ile yapılır.
- İşlem sonrası eller Eldiven Kullanma ve El Yıkama Talimatına uygun olarak yıkanır ve el dezenfektanı ile el hijyeni sağlanır.

4.2.Cihaz Kalibrasyonu

- OH 'de her cihaz için cihaz sicil kartı bulunmaktadır. Cihaz sicil kartına cihazların arıza, bakım ve kalibrasyon kayıtları işlenmektedir.
- Arıza bakım işlemlerinde cihaz bozuk çıkar ise kırmızı renkli “ KULLANIM DIŞI” etiketi yapıştırılır.
- Bakım işlemleri Cihaz sicil kartına kayıt edilir.

5.SORUMLULAR

Bu talimatın uygulanmasından tüm sağlık çalışanları sorumludur.