

	KALİTE YÖNETİM DOKÜMANLARI	Doküman No: BL-TL-20 Yayın Tarihi : 01.08.2017 Revizyon No : 01 Revizyon Tar.: 27.11.2018 Sayfa No : 1/2
	KOAGÜLASYON CİHAZI KULLANMA TALİMATI	

Revizyon No	Yapılan Revizyon	Rev. Sayfası	Revizyon Tarihi	Revizyonu Yapan
01	Koagülasyon cihazının değişmesi nedeniyle talimatın uygulama kısmı değiştirilmiştir.		27.11.2018	Emine EREN
Gözden Geçirme	Gözden Geçirildi Son Gözden Geçirme:06.02.2018-08	Tüm İçerik	07.11.2019	Emine EREN Laboratuvar Sorumlu Teknisyeni
Gözden Geçirme	Gözden Geçirildi	Tüm İçerik	10.11.2022	Mesut ÖZDEMİR Laboratuvar Sorumlu Teknisyeni
HAZIRLAYAN		KALİTE SİSTEM ONAYI		ONAY
LABORATUVAR SORUMLU TEKNİSYENİ		KALİTE YÖNETİCİSİ		BAŞHEKİM

	KALİTE YÖNETİM DOKÜMANLARI	Doküman No: BL-TL-20
	KOAGÜLASYON CİHAZI KULLANMA TALİMATI	Yayın Tarihi : 01.08.2017 Revizyon No : 01 Revizyon Tar.: 27.11.2018 Sayfa No : 1/2

1. AMAÇ VE KAPSAM

Bu talimatın amacı, laboratuvarda bulunan koagülasyon cihazının kullanımında ve bakımında dikkat edilecek hususları belirlemektedir. Laboratuvar işleyiş sürecini kapsar.

2. TANIMLAR VE KISALTMALAR

QC01	: Normal kontrol PT ve APTT
QC02	: Patolojik kontrol PT
QC03	: Citrol 2 sadece APTT

3. REFERANS DOKÜMANLAR

Cihaz Sicil Kartı

4. UYGULAMA:

Laboratuvarda bulunan SYSMEX CA 1500 koagülasyon cihazını kullanmadan önce; cihazın gerektirdiği şekilde kurulmuş ve bağlanmış olduğunu kontrol etmek gerekmektedir.

4.1. Cihazın Hazırlanması ve Rutin Çalışma

- SYSMEX CA 1500 koagülasyon cihazı, her sabah kapatılır ve açılır.
- Distile suyu yenilenir.
- Atık kabı boşaltılır.
- Reaktiflerin kontrolü yapılır.
- Küvetler yenilenir.
- İki kez probe rinse yapılır.
- Hazır konuma gelir.
- Barkodlar ön tarafa gelecek şekilde tüpler yerleştirilir.
- Start seçilir.

4.2. Cihaza Kontrol Verme

- Haftada bir yapılır.
- QC01, QC02, QC03 çalışılır.
- Uygunluk derecesine bakılır.

5. SORUMLULAR

Bu talimatın uygulanmasından laboratuvar sorumlu teknisyeni ve tüm laboratuvar teknisyenleri sorumludur.