



KALİTE YÖNETİM DOKÜMANLARI

Doküman No : HB-TL-11
Yayın Tarihi :23.11.2012
Revizyon No :00
Revizyon Tar....
Sayfa No :1/1

PARAFİN CİHAZI
KULLANMA TALİMATI

Revizyon No	Yapılan Revizyon	Rev. Sayfası	Revizyon Tarihi	Revizyonu Yapan
Gözden Geçirme	Gözden geçirildi. Son gözden geçirme:04.11.2018-06	Tüm içerik	06.11.2019	Özgür Güner Sorumlu Fizyoterapist
Gözden Geçirme	Gözden geçirildi.	Tüm içerik	10.11.2022	Özgür Güner Sorumlu Fizyoterapist

HAZIRLAYAN

KALİTE SİSTEM ONAYI

ONAY

FİZYOTERAPİST

KALİTE YÖNETİCİSİ

BAŞHEKİM

	KALİTE YÖNETİM DOKÜMANLARI	Doküman No : HB-TL-11 Yayın Tarihi :23.11.2012 Revizyon No :00 Revizyon Tar:.... Sayfa No :1/1
	PARAFİN CİHAZI KULLANMA TALİMATI	

1. AMAÇ VE KAPSAM

Optimed Hastanesi'nde parafin cihazının kullanımı ile ilgili standartları belirlemek ve uygulamaktır. FTR Ünitesindeki işleyiş sürecini kapsar.

2.TANIMLAR VE KISALTMALAR

FTR :Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

3. REFERANS DOKÜMANLAR

FTR Ünitesi Temizlik Kontrol Formu

4.UYGULAMA

- Parafin eriyik derecesi düşürülmek istendiğinde 1/5 oranında sıvı vazelin/parafin karıştırılabilir.
- Cihaz toprak hatlı prize takılıdır.
- Cihaz 50-60 derece arasındaki sıcaklıkta sürekli olarak çalışır.
- El-el bileği ve dirsek hastaları için kullanılır, alt ekstremiteler için kullanılmaz.
- Hasta tedavi yapılacak bölgesi açıkta kalacak şekilde giysilerini çıkarır ya da sıyrır.
- Tedavi yapılacak alandaki tüyler fazlaysa temizlenmiş olmalıdır.
- Sıcaklık hassasiyeti olan hastalar ellerini yıkar, uygulama yapılacak bölgede takı vs. olmamalıdır.
- Uzun ortalama 10 kere parafine daldırılıp çıkarılır, uygulama sırasında distal ekstremiteler hareket etmemelidir.
- Üzeri bir poşetle kaplanır, havluyla sarılır.
- Süresi dolunca havlu ve poşet çıkarılır, parafin tekrar kazana koyulur.

4.1.Cihazın Temizliği

Cihazlarının temizliği FTR Ünitesi Temizlik Kontrol Formu'na göre yapılır.

4.2.Cihaz Kalibrasyonu

- Tüm cihazlar HBYS'de demirbaş modülünde tanımlıdır. Kalibrasyon ve bakım planları bu modül üzerinden takip edilmektedir.

5.SORUMLULAR

Bu talimatın uygulanmasından tüm fizyoterapistler ve fizil tedavi teknikerleri sorumludur.