

Revizyon No	Yapılan Revizyon	Rev. Sayfası	Revizyon Tarihi	Revizyonu Yapan
Gözden Geçirme	Gözden geçirildi. Son gözden geçirme tarihi: 09.11.2017-05	Tüm sayfalar	04.11.2019	Özgür Güner Fizyoterapist
Gözden Geçirme	Gözden geçirildi.	Tüm sayfalar	05.11.2022	Özgür Güner Fizyoterapist
HAZIRLAYAN		KALİTE SİSTEM ONAYI	ONAY	
FİZYOTERAPİST		KALİTE YÖNETİCİSİ	BAŞHEKİM	

1. AMAÇ VE KAPSAM

Bu talimatın amacı Vakum Enterferans cihazının kullanımı ile ilgili standartları belirlemek ve uygulamaktır.

Vakum yapabilen özel cihazlar yardımıyla cilde negatif basınç uygulayan kaplarla uygulanan bir tedavidir.

Cihazın kullanım sürecini kapsar.

2.TANIMLAR VE KISALTMALAR

FTR :Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

HBYS : Hastane Bilgi Yönetim Sistemi

3. REFERANS DOKÜMANLAR

Cihaz Yönetimi Prosedürü

4.UYGULAMA

- El-el bileği hastaları dışındakiler, hasta mahremiyetine uygun olarak kapalı kabinlerde tedaviye alınır.
- Cihaz toprak hatlı prize takılır.
- Hasta tedavi yapılacak bölgesi açıkta kalacak şekilde giysilerini çıkarır.
- Hasta tedavisine uygun olarak tekerleksiz sandalyede oturur ya da sabit sedyeyi kullanır.
- Saç tedavi için engel teşkil edecekse hasta bone kullanır.
- Süngerler dezenfektanlı su ile göre ıslatılır.
- Cihazın uygun programı seçilir. Yapılmak istenen tedaviye göre akım şiddeti ve süresi ayarlanır ve tedavi başlatılır.
- Acil durum çağrı butonu hastanın ulaşabileceği şekilde yanında bulundurulur.
- Tedavi sonunda cihaz kabloları askılarına asılır, süngerler çıkarılır Dezenfektan Kullanım Listesine göre ıslatılır.

4.1.Temizliği

Cihaz Yönetimi Prosedürüne göre nemli bezle temizliği yapılır.

4.2.Cihaz Kalibrasyonu

Cihaz Yönetimi Prosedürü'ne göre kalibrasyon ve bakımı yapılır. Bakım, kalibrasyon ve arıza kayıtları

HBYS Demirbaş Yönetimi modülünde mevcuttur.

5.SORUMLULAR

Bu talimatın uygulanmasından FTR ünitesi çalışanları sorumludur.