

Revizyon No	Yapılan Revizyon	Rev. Sayfası	Revizyon Tarihi	Revizyonu Yapan
Gözden Geçirme	Gözden geçirildi. Son gözden geçirme tarihi:30.10.2017-05	Tüm sayfalar	04.11.2019	Özgür Güner Fizyoterapist
Gözden Geçirme	Gözden geçirildi.	Tüm sayfalar	10.11.2022	Özgür Güner Fizyoterapist
HAZIRLAYAN		KALİTE SİSTEM ONAYI		ONAY
FİZYOTERAPİST		KALİTE YÖNETİCİSİ		BAŞHEKİM

OPTIMED	KALİTE YÖNETİM DOKÜMANLARI	Doküman No : HB-TL-08 Yayın Tarihi :23.11.2012
	COLD PACK CİHAZI KULLANMA TALİMATI	Revizyon No :00 Revizyon Tar:.... Sayfa No :1/1

1. AMAÇ VE KAPSAM

Bu talimatın amacı Cold Pack cihazının kullanımı ile ilgili standartları belirlemek ve uygulamaktır. Kullanım sürecini kapsar.

2.TANIMLAR VE KISALTMALAR

FTR : Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Cold Pack : En çok kullanılan soğuk uygulama ajanıdır.

3. REFERANS DOKÜMANLAR

Cihaz Yönetimi Prosedürü

4.UYGULAMA

- Cold Pack -4 derecenin altındaki sıcaklıkta muhafaza edilir, kullanılırken katı halde olmalıdır.
- El-el bileği hastaları dışındakiler, hasta mahremiyetine uygun olarak kapalı kabinlerde tedaviye alınır.
- Hasta tedavi yapılacak bölgesi açıkta kalacak şekilde giysilerini çıkarır.
- Hasta tedavisine uygun olarak tekerleksiz sandalyede oturur ya da sabit sedyeyi kullanır.
- Saç tedavi için engel teşkil edecekse hasta bone kullanır.
- Cold Pack deriye peçete içerisinde konabileceği gibi, ıslak bir havluyla da uygulanabilir.
- Sabitlemek için velkro kullanılır.
- Acil çağrı butonu hastanın ulaşabileceği şekilde yanında bulundurulur.
- Tedavi sonunda Cold Pack yerine konur, eski soğukluğuna erişince tekrar kullanılabilir.

4.1.Temizliği

Cihaz Yönetimi Prosedürüne göre nemli bezle temizliği yapılır.

4.2.Cihaz Kalibrasyonu

Cihaz Yönetimi Prosedürü'ne göre kalibrasyon ve bakımı yapılır. Bakım, kalibrasyon ve arıza kayıtları HBYS Demirbaş Yönetimi modülünde mevcuttur.

5.SORUMLULAR

Bu talimatın uygulanmasından FTR ünitesi çalışanları sorumludur.