

| Revizyon No    | Yapılan Revizyon                                              | Rev. Sayfası        | Revizyon Tarihi | Revizyonu Yapan              |
|----------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|------------------------------|
| Gözden geçirme | Gözden geçirildi.<br>Son gözden geçirme tarihi: 07.11.2017-05 | Tüm sayfalar        | 04.11.2019      | Özgür Güner<br>Fizyoterapist |
| Gözden geçirme | Gözden geçirildi.                                             | Tüm sayfalar        | 10.11.2022      | Özgür Güner<br>Fizyoterapist |
|                |                                                               |                     |                 |                              |
|                |                                                               |                     |                 |                              |
|                |                                                               |                     |                 |                              |
|                |                                                               |                     |                 |                              |
|                |                                                               |                     |                 |                              |
|                |                                                               |                     |                 |                              |
|                |                                                               |                     |                 |                              |
|                |                                                               |                     |                 |                              |
|                |                                                               |                     |                 |                              |
|                |                                                               |                     |                 |                              |
| HAZIRLAYAN     |                                                               | KALİTE SİSTEM ONAYI |                 | ONAY                         |
| FİZYOTERAPİST  |                                                               | KALİTE YÖNETİCİSİ   |                 | BAŞHEKİM                     |

|                                                                                   |                                                             |                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|  | KALİTE YÖNETİM DOKÜMANLARI                                  | Doküman No : HB-TL-05<br>Yayın Tarihi :23.11.2012     |
|                                                                                   | CONTINUOUS PASSİVE MOTİON (CPM)<br>CİHAZI KULLANMA TALİMATI | Revizyon No :00<br>Revizyon Tar.:...<br>Sayfa No :1/1 |

## 1. AMAÇ VE KAPSAM

Bu talimatın amacı CPM cihazının kullanımı ile ilgili standartları belirlemek ve uygulamaktır. Cihaz, belirli bir düzende pasif olarak eklemlere hareket sağladığı için iyileşme hızını artırır. Diz veya kalça ameliyatı geçirmiş olan hastaları kapsar.

## 2.TANIMLAR VE KISALTMALAR

|      |                                                   |
|------|---------------------------------------------------|
| FTR  | :Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon                   |
| CPM  | :Continuous Passive Motion/ Sürekli Pasif Hareket |
| HBYS | :Hastane Bilgi Yönetim Sistemi                    |

## 3. REFERANS DOKÜMANLAR

Cihaz Yönetimi Prosedürü

## 4.UYGULAMA

- Cihaz toprak hatlı prize takılır.
- Hasta sedyeye sırtüstü uzanır.
- Hasta hareketi engellemeyecek şekilde ince bir kıyafet giymelidir.
- Cihazın tedavi dereceleri ayarlanır.
- CPM cihazı takılıp tedavi başladıktan sonra, hastaya rahatsız olduğunda tedaviyi sonlandırabileceği buton verilir.
- Acil durum çağrı butonu hastanın ulaşabileceği şekilde yanında bulundurulur.
- Tedavi sonunda cihaz çıkarılır, sehпасına yerleştirilir.

### 4.1.Temizliği

Cihaz Yönetimi Prosedürü'ne göre cihaz temizliği yapılır.

### 4.2.Cihaz Kalibrasyonu

Cihaz Yönetimi Prosedürü'ne göre cihazın bakım, kalibrasyonları yapılır. HBYS üzerinde Demirbaş yönetimi modülünden takibi yapılır.