



KALİTE YÖNETİM
DOKÜMANLARI

EKG KULLANMA TALİMATI

Dok.No : HB-TL-23
Yayın Tarihi :01.03.2009
Revizyon No :02
Revizyon Tar.:01.07.2012
Sayfa No :1/3

Revizyon No	Yapılan Revizyon	Rev. Sayfası	Revizyon Tarihi	Revizyonu Yapan
01	4. Bölüm uygulamalarındaki değişim.		13.02.2011	Eğt. Hemş. Melek KAYA
02	EKG Parçalarının temizliği ile ilgili bilgi eklenmesi.		01.07.2012	Hem.Hiz. Sevda SÜMBÜL
03	Gözden Geçirildi Son Gözden Geçirme:04.08.2018-09	Tüm içerik	02.09.2019	Sevda SÜMBÜL Hemşirelik Hizmetleri Direktörü
Gözden Geçirme	Gözden geçirildi.	Tüm içerik	10.09.2022	Sevda SÜMBÜL Hemşirelik Hizmetleri Direktörü
HAZIRLAYAN		KALİTE SİSTEM ONAYI		ONAY
HEMŞİRELİK HİZMETLERİ DİREKTÖRÜ		KALİTE YÖNETİCİSİ		BAŞHEKİM

1. AMAÇ VE KAPSAM

Bu talimatın amacı; EKG cihazının kullanımı ile standartları belirlemek ve uygulamaktır. Hasta bakım sürecini kapsar.

2. TANIMLAR VE KISALTMALAR

EKG :ElektroKardiyografi Cihazı

3. REFERANS DÖKÜMANLAR:

Cihaz Sicil Kartı

Eldiven Kullanma ve El Yıkama Talimatı

Dezenfektan Kullanım Listesi

Kalibrasyon Planı

Tıbbi Cihaz Bakım Planı

4. UYGULAMA:

- EKG cihazı kullanılırken aşağıdaki hususlara dikkat edilir.
- Eller Eldiven Kullanma ve El Yıkama Talimatına göre yıkanır.
EKG çekimi yapılacak hasta bilgilendirilir.
- Hasta sırt üstü yatırılır, üzerindeki madeni eşyalar uzaklaştırılır(küpe,yüzük,saat vb.) göğsü,el ve ayak bilekleri açılır.
- EKG puar bağlama yerlerine jel sürülür veya elektrotlar hastaya yapıştırılır.
- Cihazın güç kablosu topraklı hatlı prize takılır.
- Hasta hareket etmemesi için uyarılır.
- Elektrotlar aşağıdaki gibi yerleştirilir.

Ekstremitlerde;

Kırmızı-Sağ Kol

Siyah -Sağ Bacak

Sarı - Sol Kol

Yeşil - Sol Bacak

Prekardiyal' de

V1: Kırmızı

V2:Sarı

V3: Yeşil

V4: Kahverengi

V5: Siyah

V6: Eflatun

- Cihazın açma /kapama anahtarı açılır.
- Uygun mod seçilir, start düğmesine basılarak çekim yapılır.
- İşlem bittiğinde puarlar veya elektrotlar hastadan sökülür.
- EKG kabloları zarar görmeyecek şekilde toplanır.
- Cihazı açma/kapama düğmesinden kapatılır.
- EKG cihazı kullanıma hazır durumda bırakılır.

	KALİTE YÖNETİM DOKÜMANLARI	Dok.No : HB-TL-23 Yayın Tarihi :01.03.2009 Revizyon No :02 Revizyon Tar.:01.07.2012 Sayfa No :3/3
	EKG KULLANMA TALİMATI	

- Günlük sarj olup olmadığı açık kapatılarak batarya göstergesinden kontrol edilir.
- Kağıt bittiğinde üst kapağı açılarak yeni kağıt konur.
- Puarların temizliği her hastadan sonra sökülerek Dezenfektan Kullanım Listesine uygun dezenfektanla yapılır.
- Puarlar kurulanır ve kullanıma hazır bırakılır.

4.1. Cihazın Temizliği

Cihazın temizliği için kullanılan dezenfektan malzeme beze sıkılarak temizliği yapılır.

4.2.Cihaz Kalibrasyonu

Tüm cihazlar HBYS'de demirbaş modülünde tanımlıdır. Kalibrasyon ve bakım planları bu modül üzerinden takip edilmektedir.

5.SORUMLULAR

Bu talimatın uygulanmasından hasta takip ve tedavisini yapan tüm hemşireler sorumludur.