

	KALİTE YÖNETİM DOKÜMANLARI	Doküman No :BL-TL-16 Yayın Tarihi :01.08.2017 Revizyon No :00 Revizyon Tar:.... Sayfa No :1
	COBAS 6000 CİHAZI KULLANIM TALİMATI	

Revizyon No	Yapılan Revizyon	Rev. Sayfası	Revizyon Tarihi	Revizyonu Yapan
Gözden Geçirme	Gözden Geçirildi. Son Gözden Geçirme:28.08.2018-01	Tüm sayfalar	26.08.2019	Emine EREN Laboratuvar Sorumlu Teknisyeni
Gözden Geçirme	Gözden Geçirildi.	Tüm sayfalar	27.08.2022	Mesut ÖZDEMİR Laboratuvar Sorumlu Teknisyeni
HAZIRLAYAN		KALİTE SİSTEM ONAYI	ONAY	
LABORATUVAR SORUMLU DOKTORU		KALİTE YÖNETİCİSİ	BAŞHEKİM	

	KALİTE YÖNETİM DOKÜMANLARI	Doküman No :BL-TL-16 Yayın Tarihi :01.08.2017 Revizyon No :00 Revizyon Tar:.... Sayfa No :2
	COBAS 6000 CİHAZI KULLANIM TALİMATI	

1. AMAÇ VE KAPSAM

Bu talimatın amacı, laboratuarda bulunan Cobas 6000 cihazının kullanımında ve bakımında dikkat edilecek hususları belirlemektedir. Laboratuvar işyeliş sürecini kapsamaktadır.

2. TANIMLAR VE KISALTMALAR

3. REFERANS DOKÜMANLAR

4. UYGULAMA:

Laboratuarda bulunan Cobas 6000 cihazını kullanmadan önce; cihazın gerektirdiği şekilde kurulmuş ve bağlanmış olduğunu kontrol etmek gerekmektedir. Sarf malzemeleri kontrolü yapılır.

4.1. Günlük Çalışmaya Başlama

- Maintenance ; günlük açılış
- Reagent-status-print-reagent lead-unload

4.2. Günlük Rutin Çalışma

- Ana menüden work place seçilir. Hasta girişleri yapılır.Çalışılacak testler seçilir. Ekran sarı olur.Barcode raed error –Rack no-pozisyon-add-ok-save- hasta serumu racka konur. Numune verme bölümüne konur start verilir.Work place –data review ekranından hasta sonuçları izlenir.
- Hasta girişi yapılan numuneler monitörden takip edilerek herhengi bir testin bloklanıp bloklanmadığına, alarm verip vermediğine bakılır. Sonuçların geçerliliği kontrol edilir ve sonuçlar onaylanır.

4.3.Gün Sonu

- Tüm racklar sistemden çıkarılır.
- Test ekranındaki testler kontrol edilir.
- Cihaz stand by duruma getirilir.
- Yeşil rack hazırlanır.
 - Pozisyon 1:NaoH
 - Pozisyon 2:UE cleaning solutin
 - Pozisyon 3:Aktivatör (Aktivatör hazırlama:liyofilize olan aktivatör şişesi 12ml distile su ile sulandırılır.30dk beklenir.Hazırlanan solüsyon stabilitesi 2-8 c de yedi gündür

Yeşil rack numune giriş tepsisine yerleştirilir.utility-maintenancer-günlük kapanış-execute seçilerek gün sonu bakımı yapılır.

4.4. Kısa Kodlar

0-----Order- Henüz pipetlenmemiş hastalar

P----Precessing- Çalışmaya başlamış hasta

I-----Incomplete- En az bir tanesinde data alarmıolan hasta ya da kontrol sonuçları

-----Boş----- Alarmsız olarak çalışıp sonuçlanmış sonuçlar

	KALİTE YÖNETİM DOKÜMANLARI	Doküman No :BL-TL-16 Yayın Tarihi :01.08.2017 Revizyon No :00 Revizyon Tar:.... Sayfa No :3
	COBAS 6000 CİHAZI KULLANIM TALİMATI	

H---Hast----- Ana bilgisayara gönderilmiş hasta

Demogra phic ---Hasta bilgileri görülür ve değişiklik yapılır.

Search----- Hasta sonucu aramak için kullanılır.Filter off konumuna getirilir.Sample ID yazılarak match case işaretlenir ve oklara basılarak arama yapılır.

Filter-----Belli tarihler arasındaki sonuçları görmek için kullanılır.

5.SORUMLULAR

Bu talimatın uygulanmasından Laboratuvar Sorumlu Teknisyeni ve tüm laboratuvar teknisyenleri sorumludur.