



KALİTE YÖNETİM DOKÜMANLARI

ASKILI ENDOSKOP KURUTMA DOLABI
KULLANMA TALİMATI

Doküman No : SH-TL-02
Yayın Tarihi :23.11.2012
Revizyon No :00
Revizyon Tar:...
Sayfa No :1/1

Revizyon No	Yapılan Revizyon	Rev. Sayfası	Revizyon Tarihi	Revizyonu Yapan
Gözden Geçirme	Gözden Geçirildi Son Gözden Geçirme:02.06.2016-04	Tüm sayfalar	10.08.2019	Meltem KAYA Endoskopi Hemşiresi
Gözden Geçirme	Gözden Geçirildi	Tüm sayfalar	10.08.2022	Meltem KAYA Endoskopi Hemşiresi
HAZIRLAYAN		KALİTE SİSTEM ONAYI		ONAY
ENDOSKOPİ HEMŞİRESİ		KALİTE YÖNETİCİSİ		BAŞHEKİM

	KALİTE YÖNETİM DOKÜMANLARI	Doküman No : SH-TL-02 Yayın Tarihi :23.11.2012 Revizyon No :00 Revizyon Tar:... Sayfa No :1/1
	ASKILI ENDOSKOP KURUTMA DOLABI KULLANMA TALİMATI	

1. AMAÇ VE KAPSAM

Kurumda Askılı Endoskop Kurutma Dolabı'nın kullanımını tanımlamaktır. Endoskoi ünitesindeki işleyiş sürecini kapsamaktadır.

2.TANIMLAR VE KISALTMALAR

3. REFERANS DOKÜMANLAR

4.UYGULAMA

4.1. Kullanımı

- Endocleaner yıkama cihazında temizlenmiş olan endoskop handle kısmından tutulur ve yukarıda bulunan askılara asılır.
- Cihaz konnektörü, prosesöre girişleri yapılan kısımları yukarı bakacak şekilde asılır.
- Biyopsi pensleri boş askılara asılır.
- Cihaz power düğmesinden açılır.
- F1 programına basılır.
- Ok tuşuna basılır.

Cihaz kurutma işlemini ultraviyole ışınları ile 3 dk tamamlar ve kullanıma hazır hale getirir.

5. SORUMLULAR

Endoskopi ünitesinde çalışan hemşire ve doktorlar sorumludur.