

	KALİTE YÖNETİM DOKÜMANLARI	Doküman No : EN-TL-10 Yayın Tarihi :25.12.2015 Revizyon No :00 Revizyon Tar.: Sayfa No :1/4
	DEKONTAMİNASYON TALİMATI	

Revizyon No	Yapılan Revizyon	Rev. Sayfası	Revizyon Tarihi	Revizyonu Yapan
Gözden Geçirme	Gözden Geçirildi Son Gözden Geçirme:04.07.2018-03	Tüm Sayfalar	10.08.2019	Ece Nur TOPCU Eğitim ve Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi
Gözden Geçirme	Gözden Geçirildi	Tüm Sayfalar	20.08.2022	Ece Nur TOPCU Eğitim ve Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi
HAZIRLAYAN		KALİTE SİSTEM ONAYI		ONAY
AMELİYATHANE SORUMLU HEMŞİRESİ		KALİTE YÖNETİCİSİ		BAŞHEKİM

1.AMAÇ VE KAPSAM

	KALİTE YÖNETİM DOKÜMANLARI	Doküman No : EN-TL-10 Yayın Tarihi :25.12.2015 Revizyon No :00 Revizyon Tar.: Sayfa No :2/4
	DEKONTAMİNASYON TALİMATI	

Kontamine olmuş aletleri, bakım ve sterilizasyona hazır hale getirirken aynı zamanda personel sağlığını da koruyabilmek için yöntem belirlemektir. Kontamine olmuş tüm aletlerin temizliğini, sterilizasyona hazır hale getirilmesini kapsar.

2.TANIMLAR VE KISALTMALAR

Dezenfeksiyon: Fiziksel ya da kimyasal yolla mikroorganizmaların etkisiz hale getirilmesi ve üremelerinin engellenmesidir.

Dezenfektan: Dezenfeksiyon işleminde kullanılan kimyasallara verilen isimdir.

Enzimatik Solüsyon : Yapısında bileşeninde protein çözen üçlü enzim .(Lipaz, Amilaz, Proteaz) bulunan dekontaminasyon için kullanılan kimyasal.

Dekontaminasyon: Dezenfeksiyon ya da sterilizasyon öncesinde; cerrahi aletlerdeki gözle görülebilir tüm kan, kir, vücut atıkları ve yabancı maddelerin uzaklaştırılması, alet üzerindeki mikroorganizma sayısının azaltılması ve aletlerin korozyondan korunması için yapılan ön yıkama

3-REFERANS DOKÜMANLAR

Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon Talimatı

Enfeksiyon Kontrol Prosedürüne

4. UYGULAMA

4.1.Uygulama Esasları

Malzemeler özelliklerine göre sınıflandırılarak ayrı ayrı dekontaminasyon ve dezenfeksiyon programı uygulanır.Cerrahi aletlerdeki gözle görülebilir tüm kan, kir, vücut atıkları ve yabancı maddelerin uzaklaştırılması, alet üzerindeki mikroorganizma sayısının azaltılması ve aletlerin korozyondan korunması için sterilizasyon öncesi ön yıkama yapılmalıdır. Yıkama işlemi aletlerin kullanımından sonra mümkün olan en kısa süre içerisinde yapılmalı, aletler kirli bekletilmemelidir. Temiz ya da kirli görünmesine bakılmaksızın tıbbi işlemlerde kullanılan tüm aletler temizlenmelidir.

4.2.Manuel Temizlik

Manuel temizlik için paslanmaz çelik lavabo kullanılır. Manuel temizlikte yıkama yapılmadan önce normal aletler, hassas aletler ve çok parçalı aletler birbirinden ayrılmalıdır. Aletlerin tamamı kapanacak şekilde enzimatik/dezenfektan içerisine batırılmalıdır. Lümenli aletlerin içinden enjektör veya tabanca yardımı ile solüsyon geçirilmelidir. Cerrahi makas, pens vb aletler açılarak enzimatik solüsyonun içine atılmalıdır. Aletlerin üzerinde ve eklemlerde bulunan kan, protein, mukus ve doku parçası gibi artıklar yumuşak fırça ile fırçalanmalıdır. Aletlerin özelliğine göre uygun aparatlar kullanılmalıdır.(Basıncı su ve hava tabancası, sünger, özel fırça, yumuşak bez vs.) Enzimatik özellikli solüsyonda 15 dk bekletilir. Yıkama suyun ısısı proteinlerin koagüle olup birbirlerine yapışmasına neden olmaması için 40–50° C'den fazla olmamalıdır. Akan su altında durulanır ve lifsiz bir bez ve hava tabancası yardımıyla kurutulur.

İşlem bittğinde lavabo boşaltılır ve deterjan-dezenfektanla lavabonun ve tezgahın yüzeyleri silinir.

Lavabo ılık musluk suyuyla 2 kere yıkanır.

	KALİTE YÖNETİM DOKÜMANLARI	Doküman No : EN-TL-10 Yayın Tarihi :25.12.2015 Revizyon No :00 Revizyon Tar.: Sayfa No :3/4
	DEKONTAMİNASYON TALİMATI	

İkinci defa lavaboların yüzeyini ve tezgahı enzimatik solüsyon-dezenfektanla silinir.

Arızalı ve/veya işlevinde aksaklık olan aletler kullanıldıkları bölümden arıza bilgisi kaydedilmiş olarak sterilizasyon ünitesine gönderilir. Arızalı alet dekontamine edilir.

Creutzfeldt-Jacobs (Deli dana hastalığı etkeni) olan ve/veya olasılığı olan hastalarda kullanılan aletler sterilizasyona teslim edildiğinde; dekontaminasyondan önce, 121°C 1 saat veya 134°C 20 dakika basınçlı buhar sterilizasyonu işlemine tabi tutulur.

Dekontamine edilen aletler paketleme odasına verilir ve medikal paketleme usulüne uygun olarak paketlenir. Tüm dezenfeksiyon işlemleri Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon Talimatına uygun olarak yapılır. Bu işlemler sırasında alet ve setlerin sayımı da yapılmış olur. Her ameliyat seti içinde, mevcut olan aletlerin kayıtlı olduğu ve sayılarının kaydedildiği bir set listesi bulunur. Ameliyat sonrası set içindeki aletler mevcut alet listesi ile karşılaştırılarak kontrol edilir. Sayma işlemi ön yıkamadan sonra yapılır.

4.3.Cerrahi Motor ve Aksesuarları

Cerrahi motor ve aksesuarlarının temizliğinde üretici firmanın önerileri dikkate alınır.

Motorları kesici ve delici aksesuarlar kullanıldığı yerden ayrılmış ve emniyete alınmış olarak gelir.

Tüm aksesuarları birbirinden ayrılır. Eğer firma bilgileri yoksa motorlar suya batırılmaz ve ultrasonik yıkama cihazında yıkanmaz. Enzimatik solüsyona batırılmış bezle silinerek temizlendikten sonra dezenfektan ile silinir. Kablolu olanların motorların kabloları çıkarılmadan yıkama ve dezenfeksiyon işlemi yapılır. Kablolar enzimatik ve dezenfektan solüsyonla silinir. Manuel dekontaminasyon işlemi yapılan parçalar, yumuşak lifsiz bir bezle kurularak paketleme odasına verilir.

4.4.Laparoskopi Aletleri

- Laparoskopi aletleri demonte edilir.
- Küçük aksesuarların kaybolmamasına dikkat edilir.
- Tüplerin içinden basınçlı su ve hava geçirilir.
- Kanüllü aletlerin içi tekrar kontrol edilir, eğer yeterince temizlenmemişse işlem tekrarlanır, gerekirse uygun bir fırça yardımı ile temizlenir.
- Yumuşak lifsiz bir bez/hava tabancası ile kurulanır.
- Dekontaminasyonu sağlanan aletler paketleme odasına verilir.

4.5.Optikler ve Soğuk Işık Kordonları

- Kullanılan tüm optiklerin ve soğuk ışık kordonlarının adaptörleri demonte edilir.
- Kaba kiri akan su altında giderilir.
- Enzimatik/dezenfektan solüsyonda bekletilir, durulanır.
- Yumuşak lifsiz bir bez ile kurulanır.
- Kontrol edilir; ışık taşıyıcı, göz ve uç kısımlarda leke varsa optik temizleyici yardımı ile temizlenir, tekrar durularak kurulanır.
- Soğuk ışık kordonları daire şeklinde sarılır.

	KALİTE YÖNETİM DOKÜMANLARI	Doküman No : EN-TL-10 Yayın Tarihi :25.12.2015 Revizyon No :00 Revizyon Tar.: Sayfa No :4/4
	DEKONTAMİNASYON TALİMATI	

- Adaptörler monte edilir.
- Tüm bu işlemler masa tezgah ve yumuşak bir zemin üzerinde yapılır.
- Paketleme odasına verilir.

4.6.Anestezi Malzemeleri

Ameliyathanede kullanılan laryngoskop bladeleri ilgili kullanıcı tarafından dekontaminasyon/ dezenfeksiyonu yapılarak tekrar kullanıma hazır hale getirilir.Bu işlemler sırasında personel “kişisel koruyucu ekipmanları; eldiven, maske ve gözlük, sıvı geçirmeyen önlük gibi genel korunma yöntemlerini kullanılan Enfeksiyon Kontrol Prosedürünene uygun olarak standart önlemler veya kontaminasyon türüne yönelik özel önlemler alınır.

5.SORUMLULAR

Ameliyathane hemşireleri ve tüm diğer hemşireler, ayrıca sterilizasyon teknisyeni bu talimatın gereklerini bilir ve uygular.