

	KALİTE YÖNETİM DOKÜMANLARI	Doküman No :SH-TL-05 Yayın Tarihi :13.07.2016 Revizyon No :00 Revizyon Tar.:11.07.2019 Sayfa No :1/3
	HİDROJEN PEROKSİT PLAZMA STERİLİZATÖR KULLANIM TALİMATI	

Revizyon No	Yapılan Revizyon	Rev. Sayfası	Revizyon Tarihi	Revizyonu Yapan
Gözden Geçirme	Gözden Geçirildi Son Gözden Geçirme:20.07.2018-02	Tüm sayfalar	11.07.2019	Hasan COŞKUN Ameliyathane Sorumlu Hemşiresi
Gözden Geçirme	Gözden Geçirildi	Tüm sayfalar	15.07.2022	Hasan COŞKUN Ameliyathane Sorumlu Hemşiresi
HAZIRLAYAN		KALİTE SİSTEM ONAYI		ONAY
AMELİYATHANE SORUMLU HEMŞİRESİ		KALİTE YÖNETİCİSİ		BAŞHEKİM

	KALİTE YÖNETİM DOKÜMANLARI	Doküman No :SH-TL-05 Yayın Tarihi :13.07.2016 Revizyon No :00 Revizyon Tar.:11.07.2019 Sayfa No :1/3
	HİDROJEN PEROKSİT PLAZMA STERİLİZATÖR KULLANIM TALİMATI	

1. AMAÇ VE KAPSAM

MSÜ'de Hidrojen Peroksit Plazma Sterilizatörünün kullanımını tarif etmektir. Talimat ameliyat hizmetlerini kapsamaktadır.

2.TANIMLAR VE KISALTMALAR

MSÜ :Merkezi Sterilizasyon Ünitesi

3. REFERANS DOKÜMAN

Sterilizasyon Malzeme Teslim Kayıt Formu

4.UYGULAMA

- Cihazın power düğmesine basınız .
- Ekranın (bilgisayar gibi) kendini test etmesini bekleyiniz.
- Dokunmatik ekranda cihazın resmi ve sağ alt köşede Enter system-Power off yazıları çıkacaktır. Enter system tuşuna basınız.
- Ekranda çıkan 5 kutucuktan sol baştaki enter system kutucuğuna basınız.
- Ekranın ortasınd çıkan alt alta 3 kutucuğun en alttaki yeşil renk ile yazılı Operatör entrance yazan kutucuğa basınız.
- Ekran bekleme arayüzüne gelecektir.
- Open close tuşuna basarak kapı açılır.
- Cihazın yüklemesi yapılır ve yüklemesi sırasında cihaza kesinlikle selülöz içeren, sıvı materyal veya süngerimsi malzemeler cihazın steril edemeyeceği özellikte olduğu için yüklenmemelidir.
- Yükleme mutlaka tyvcek propilen paketleme malzemesi kullanılması gerekir.
- Paketlemede her yükün içerisine mutlaka bir adet kimyasal indikatör konulur ve bu kimyasal indikatör üzerine takip numarası verilir. (örnek H060811001)
- Yükleme yaparken malzemeler çok sıkıştırılmadan ve kağıt kağıda seffaf poşet poşete gelecek şekilde yan şekilde yükleme yapılır.
- Ekranda , bekleme (aynı zamanda ısınma) konumunda sağ köşede yukarıdan aşağıya beliren yedi küçük yuvarlak ışığın kırmızıdan yeşile dönmesini bekleyiniz.
- Sağ köşedeki tüm ışıklar (7 tane) yeşile dönünce cihaz kullanıma hazırdır.
- Isınmış ve kullanıcı arayüzünde beklemede olan cihazın ekranında mevcut olan 2 büyük 8 küçük kutucuklardan sol üstte olan standart mode kutucuğu uzun lümenli çevrimler için kullanılır ve yaklaşık olarak 55-60 dk sürer.
- Yine ekranın sağ üstünde bulunan ikinci büyük test mode yazan kutucuk az yük veya lümenli olmayan ürünler için kullanılır ve yaklaşık 30-35 dk sürer.
- Cihazın her çevriminde yüke biyolojik indikatör de yüklenir .
- Cihazın çevrim programı sona erdikten sonra open close tuşuna basılarak kapısı açılır .

	KALİTE YÖNETİM DOKÜMANLARI	Doküman No :SH-TL-05 Yayın Tarihi :13.07.2016 Revizyon No :00 Revizyon Tar.:11.07.2019 Sayfa No :1/3
	HİDROJEN PEROKSİT PLAZMA STERİLİZATÖR KULLANIM TALİMATI	

- Biyolojik indikatör tüpü iki tarafından sıkılarak kırılır ve çalkalanır .
- Biyolojik indikatör cihaz üzerinde bulunan inkibatöre yerleştirilir ve bekleme ekranında iken incubation tuşuna basılır ve tüp hangi numaraya yerleştirildi ise cihaz bunu otomatik olarak okur ve kırmızı rengi yeşile döner. Yerleştirildikten sonra run tuşuna basarak inkibatör süresi baslatılmış olur.
- Biyolojik indikatörün süresi set incubation tuşuna basılarak saat ayarlaması yapılır. 48 saat olarak ayarlandıktan sonra inkibasyon süresi başlatılmış olunur.
- İnkibasyon sıcaklığı da set incubation temperture tuşuna basarak sıcaklık ayarlanır. Sıcaklık değerei olarak ta 56 derece ayarlanır.
- İnkibasyon süresi sona erdikten sonra tüpün renginin mor olması bize negatif sonucu sarı olması ise pozitif sonucunu vermektedir .
- Cihazdan çıkan yükler üzerlerine son kullanma tarihi sterilizasyon gününden itibaren bir yıl olarak dağıtımı yapılır.

4.1 Malzeme Teslimi ve Takip Kayıtları

- MSÜ 'ne gelen malzemeler Sterilizasyon Malzeme Teslim Kayıt Formu ne uygun olarak teslim alınır ve kaydı yapılır.
- Yük üzerindeki kimyasal indikatörlere takip numarası verilerek kayıtları yapılır.
- Takip numarasında H060811001 örneğindeki gibi verilir . Bu numarada H = Hidrojen Peroksit plazma 06 gün 08 ay 11 yıl ve 001 sterilizasyon sıra numarasını ifade etmektedir.

4.2 Cihazın Kapatılması

- Kullanıcı arayüzündeki kutucuklardan Exit system kutucuğuna (sağ alt köşedeki) basınız.
- Açılıştaki gibi ekranda cihazın resmi ve sağ alt köşede (Enter system- Power off) yazıları çıkacaktır.
- Power off kutucuğuna basınız , power düğmesi otomatik olarak atacaktır ve cihaz kapanacaktır.

5.SORUMLULAR

Bu talimatın uygulanmasından Ameliyathane sorumlusu ve sterilizasyon çalışanları sorumludur.