



## KALİTE YÖNETİM DOKÜMANLARI

PNÖMATİK KOMPRESYON CİHAZI  
KULLANMA TALİMATI

Doküman No : HB-TL-14

Yayın Tarihi :23.11.2012

Revizyon No :00

Revizyon Tar:....

Sayfa No :1/1

| Revizyon No    | Yapılan Revizyon                                     | Rev. Sayfası        | Revizyon Tarihi | Revizyonu Yapan |
|----------------|------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|
| Gözden Geçirme | Gözden Geçirildi<br>Son Gözden Geçirme:06.06.2018-07 | Tüm İçerik          | 05.06.2019      | Özgür GÜNER     |
| Gözden Geçirme | Gözden Geçirildi                                     | Tüm İçerik          | 10.06.2022      | Özgür GÜNER     |
|                |                                                      |                     |                 |                 |
|                |                                                      |                     |                 |                 |
|                |                                                      |                     |                 |                 |
|                |                                                      |                     |                 |                 |
|                |                                                      |                     |                 |                 |
|                |                                                      |                     |                 |                 |
| HAZIRLAYAN     |                                                      | KALİTE SİSTEM ONAYI | ONAY            |                 |
| FİZYOTERAPİST  |                                                      | KALİTE YÖNETİCİSİ   | BAŞHEKİM        |                 |

|                                                                                  |                                                 |                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | KALİTE YÖNETİM DOKÜMANLARI                      | Doküman No : HB-TL-14<br>Yayın Tarihi :23.11.2012<br>Revizyon No :00<br>Revizyon Tar:....<br>Sayfa No :1/1 |
|                                                                                  | PNÖMATİK KOMPRESYON CİHAZI<br>KULLANMA TALİMATI |                                                                                                            |

## 1. AMAÇ VE KAPSAM

PNömatik kompresyon cihazının kullanımı ile ilgili standartları belirlemek ve uygulamaktır. Fizik tedavi ve rehabilitasyon sürecini kapsar.

## 2.TANIMLAR VE KISALTMALAR

FTR :Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

## 3. REFERANS DOKÜMANLAR

Dezenfektan Kullanım Listesi

Temizlik ve Hijyen Planı

## 4.UYGULAMA

El-el bileği hastaları dışındakiler, hasta mahremiyetine uygun olarak kapalı kabinlerde tedaviye alınır.

Cihaz toprak hatlı prize takılır.

Hasta tedavisine uygun olarak tekerleksiz sandalyede oturur ya da sabit sedyeyi kullanır.

Tedavi edilecek uzuv çıplak ya da ince bir kıyafet olabilir.

Hangi bölge tedavi edilecekse o bölgenin aparatı cihaza takılır.

Tek aparat kullanılacaksa diğeri yere konur.

Alt ekstremitede gerektiğinde büyütme aparatları kullanılır.

Acil durum çağrı butonu hastanın ulaşabileceği şekilde yanında bulundurulur.

Cihazın uygun programı seçilir. Yapılmak istenen tedaviye göre tedavi şekli ve süresi ayarlanır, tedavi başlatılır.

Tedavi sonunda aparatlar çıkarılır, yerine konur.

### 4.1.Temizliği

- Cihazların temizliği Temizlik ve Hijyen Planı'na göre yapılır.

### 4.2.Cihaz Kalibrasyonu

- Kurumda her cihaz için cihaz sicil kartı bulunmaktadır.
- Tıbbi cihaz bakım planına göre bakımları yapılmaktadır.
- Kalibrasyon planına göre yılda bir kalibrasyonları yapılır.

## 5.SORUMLULAR

Bu talimatın uygulanmasından fizik tedavi sorumlu teknisyeni ve diğer tüm fizik tedavi teknisyenleri sorumludur.