

	KALİTE YÖNETİM DOKÜMANLARI	Dok.No : BL-TL-09 Yayın Tarihi :01.09.2009 Revizyon No :01 Revizyon Tar.:27.04.2019 Sayfa No :1/3
	İDRAR CİHAZI KULLANMA TALİMATI	

Revizyon No	Yapılan Revizyon	Rev. Sayfası	Revizyon Tarihi	Revizyonu Yapan
01	Yeni idrar cihazına uygun olarak revize edilmiştir. Son Gözden Geçirme:15.09.2018-09	Tüm İçerik	27.04.2019	Emine Eren Laboratuvar sorumlu Teknisyeni
Gözden Geçirme	Gözden geçirildi.	Tüm içerik	30.04.2022	Mesut ÖZDEMİR Labaratuvar Sorumlu Teknisyeni
HAZIRLAYAN		KALİTE SİSTEM ONAYI		ONAY
LABORATUVAR SORUMLU DOKTORU		KALİTE YÖNETİCİSİ		BAŞHEKİM

OPTIMED	KALİTE YÖNETİM DOKÜMANLARI	Dok.No : BL-TL-09 Yayın Tarihi :01.09.2009 Revizyon No :01 Revizyon Tar.:27.04.2019 Sayfa No :2/3
	İDRAR CİHAZI KULLANMA TALİMATI	

1. AMAÇ VE KAPSAM

Bu talimatın amacı laboratuvarda bulunan DIRUI H-800/ DIRUI FUS-100 idrar cihazının kullanımında ve bakımında dikkat edilecek hususları belirtmektedir.Laboratuvar işleyiş sürecini kapsar.

2. TANIMLAR VE KISALTMALAR

3. REFERANS DOKÜMANLAR

4. UYGULAMA:

Laboratuvarda bulunan DIRUI H-800/ DIRUI FUS-100 idrar cihazını kullanmadan önce; cihazın gerektirdiği şekilde kurulmuş ve bağlanmış olduğunu kontrol etmek gerekmektedir.

4.1.Günlük Çalışmaya Başlama

FUS-100/200 cihazı açılır.

H-800 cihazı açılır.

Bilgisayar açılır.

FUS-100/200 programı açılır. Kullanıcı adı: admin şifresi:1

FUS-100/200 GÜNLÜK İŞLEMİ

24 SAATLİK YIKAMA

FOCUS ÇALIŞMASI

H-800 GÜNLÜK İŞLEMİ

GÜNLÜK YIKAMA 3 DEFA

4.2.Kontroller

FUS-100/200 cihazına pazartesi çarşamba cuma kontrol verilir.

Pozitif ve negatif kontrol çalışması yapılır.

H-800 cihazına haftada 1 kere pozitif ve negatif kontrol çalışması yapılır.

4.3.Aylık Bakım Ve Kalibrasyon

H-800

SG KONTROL

TURBİD KONTROL

STRİB KALİBRASYONU

SG KALİBRASYON

TURBİD KALİBRASYONU

FUS100/200

STANDART SOLUTION ÇALIŞMASI

KONTROL GİRİŞİ

4.4.Numune Çalışma

	KALİTE YÖNETİM DOKÜMANLARI	Dok.No : BL-TL-09 Yayın Tarihi :01.09.2009 Revizyon No :01 Revizyon Tar.:27.04.2019 Sayfa No :3/3
	İDRAR CİHAZI KULLANMA TALİMATI	

Bilgisayar ekranında worklist kısmından start verilir.

Daha sonra ekrana çıkan sample no kutucuğuna,

H-800 ekranındaki no numarası yazılır.

Cihaz online sample test moduna geçtikten sonra numunelerin yüklü olduğu rack h-800 cihazının

Önündeki sampler unit kısmından barkod etiketleri barkod okuyucuya bakacak şekilde yerleştirilir.

H-800c ekranından start'a basılır.

5.SORUMLULAR

Bu talimatın uygulanmasından laboratuvar sorumlu teknisyeni ve tüm laboratuvar teknisyenleri sorumludur.