



KALİTE YÖNETİM DOKÜMANLARI

OPTİK STERİLİZATÖRÜ KULLANMA
TALİMATI

Doküman No :HE-TL-03

Yayın Tarihi :15.10.2012

Revizyon No :00

Revizyon Tar.....

Sayfa No :1/3

Revizyon No	Yapılan Revizyon	Rev. Sayfası	Revizyon Tarihi	Revizyonu Yapan
Gözden Geçirme	Gözden Geçirildi Son Gözden Geçirme:06.02.2018-08	Tüm İçerik	08.03.2019	Sevda SÜMBÜL Hemşirelik Hizmetleri Direktörü
Gözden Geçirme	Gözden Geçirildi	Tüm İçerik	15.03.2022	Sevda SÜMBÜL Hemşirelik Hizmetleri Direktörü
HAZIRLAYAN		KALİTE SİSTEM ONAYI	ONAY	
HEMŞİRELİK HİZMETLERİ DİREKTÖRÜ		KALİTE YÖNETİCİSİ	BAŞHEKİM	

	KALİTE YÖNETİM DOKÜMANLARI	Doküman No :HE-TL-03 Yayın Tarihi :15.10.2012
	OPTİK STERİLİZATÖRÜ KULLANMA TALİMATI	Revizyon No :00 Revizyon Tar.:.... Sayfa No :2/3

1. AMAÇ VE KAPSAM

Bu talimatın amacı; kurumda kullanılan KBB optiklerinin sterilizasyonunu sağlamaktır. Hasta bakım sürecini kapsar.

2. TANIMLAR VE KISALTMALAR

KBB :Kulak Burun Boğaz

3. REFERANS DÖKÜMANLAR:

El Yıkama ve Eldiven Giyme Talimatı

Dezenfektan Kullanım Listesi

4. UYGULAMA:

- İşlem öncesi eller, Eldiven Kullanma ve El Yıkama Talimatına uygun olarak yıkanır, kurulanır ve el dezenfektanı ile el hijyeni sağlanır.
- İşlem sırasında temiz nonsteril eldiven kullanılması uygundur.
- Steril olacak optikler %70 lik alkol ile silinir.
- Optiklerin temiz olmasına dikkat edilir.
- Optikler sterilizatöre yerleştirilir.
- Optiklerin sterilizatör içerisine yerleştikten emin olunur.
- Sterilizatör fişi prize takılır.
- Açma kapama düğmesine basılarak sterilizatör çalıştırılır.
- Açma kapama düğmesinin kırmızı yanması cihazın çalıştığını gösterir.
- Sterilizatördeki optikler 20 dakikada steril edilir.
- Sterilizatör açma kapama düğmesine basılarak kapatılır.
- Optikler kullanıma hazır olur.

4.1.Temizliği:

- Sterilizatörün temizliği yapılmadan önce fişi prizden çıkarılır.
- İşlem öncesi eller El Yıkama ve Eldiven Giyme Talimatı'na uygun olarak yıkanır kurulanır ve el dezenfektanı ile el hijyeni sağlanır.
- İşlem sırasında temiz nonsteril eldiven kullanılması uygundur.
- Sterilizatörün temizliği Dezenfektan Kullanım Listesine uygun olarak yapılır.
- İşlem sonrası eller El Yıkama ve Eldiven Giyme Talimatı'na uygun olarak yıkanır ve el dezenfektanı ile el hijyeni sağlanır.

4.2. Cihaz Yönetimi

Tüm cihazlar HBYS'de demirbaş modülünde tanımlıdır. Kalibrasyon ve bakım planları bu modül üzerinden takip edilmektedir.

5.SORUMLULAR

	KALİTE YÖNETİM DOKÜMANLARI	Doküman No :HE-TL-03 Yayın Tarihi :15.10.2012
	OPTİK STERİLİZATÖRÜ KULLANMA TALİMATI	Revizyon No :00 Revizyon Tar:..... Sayfa No :3/3

Bu talimatın uygulanmasından tüm Kulak Burun Boğaz Uzmanları sorumludur.