

|                                                                                  |                             |                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------|
|  | KALİTE YÖNETİM DOKÜMANLARI  | Dok.No :HE-TL-05<br>Yayın Tarihi :01.03.2009          |
|                                                                                  | ODYOMETRİ KULLANIM TALİMATI | Revizyon No :00<br>Revizyon Tar:....<br>Sayfa No :1/2 |

| Revizyon No    | Yapılan Revizyon                                     | Rev. Sayfası | Revizyon Tarihi | Revizyonu Yapan            |
|----------------|------------------------------------------------------|--------------|-----------------|----------------------------|
| Gözden Geçirme | Gözden Geçirildi<br>Son Gözden Geçirme:06.02.2018-08 | Tüm İçerik   | 03.03.2019      | Erdi KESKİN<br>Odyometrist |
| Gözden Geçirme | Gözden Geçirildi                                     | Tüm İçerik   | 04.03.2022      | Erdi KESKİN<br>Odyometrist |
|                |                                                      |              |                 |                            |
|                |                                                      |              |                 |                            |
|                |                                                      |              |                 |                            |
|                |                                                      |              |                 |                            |
|                |                                                      |              |                 |                            |
|                |                                                      |              |                 |                            |
|                |                                                      |              |                 |                            |

|             |                     |          |
|-------------|---------------------|----------|
| HAZIRLAYAN  | KALİTE SİSTEM ONAYI | ONAY     |
| ODYOMETRİST | KALİTE YÖNETİCİSİ   | BAŞHEKİM |

|                                                                                  |                             |                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------|
|  | KALİTE YÖNETİM DOKÜMANLARI  | Dok.No :HE-TL-05<br>Yayın Tarihi :01.03.2009          |
|                                                                                  | ODYOMETRİ KULLANIM TALİMATI | Revizyon No :00<br>Revizyon Tar:....<br>Sayfa No :2/2 |

## 1. AMAÇ VE KAPSAM

Bu talimatın amacı; odyometri cihazının kullanımı ile standartları belirlemek ve uygulamaktır. Hizmete erişim sürecini kapsar.

## 2. TANIMLAR VE KISALTMALAR

Weber : Ölçüm değer birimi

K:B.B : Kulak Burun Boğaz

## 3. REFERANS DÖKÜMANLAR:

K.B.B Bölümü Odiyolojik Bulguları

Dezenfektan Kullanım Listesi

## 4. UYGULAMA:

- Cihazın güç kablosu topraklı hatlı prize takılır.
- Cihaz açma/kapama düğmesinden açılır.
- Hasta ses çıkarmayan özel kabine alınır.
- Hasta kabin içerisindeki sandalyeye oturtulur. Yapılacak işlem konusunda hastaya bilgi verilir. Hastanın yapması gereken işlemler anlatılır.
- Kulaklık uygun bir şekilde hastanın kulağına takılır.
- Hastanın sesi duyunca butona basması istenir ve buton hastaya verilir.
- Farklı frekans değerleriyle hava yolu eşikleri tespit edilir.
- Tespit edilen değerler K.B.B Bölümü Odiyolojik Bulguları formuna kayıt edilir.
- Hastaya takılan kulaklık çıkartılır.
- Değerlendirme için hasta doktora yönlendirilmelidir.
- Hastaya kemik yolu ölçülecek ise:
  - Kemik yolu vibratörü test yapılacak kulağa takılır.
  - Farklı frekans değerleriyle hava yolu eşikleri tespit edilir.
  - Farklı frekanslarda weber değerlerine bakılır.
  - Tespit edilen değerler K.B.B Bölümü Odiyolojik Bulguları formuna kayıt edilir.
- İşlem bittikten sonra cihaz/açma kapama anahtarından kapatılır.

### 4.1.Cihaz Yönetimi

- Tüm cihazlar HBYS'de demirbaş modülünde tanımlıdır. Kalibrasyon ve bakım planları bu modül üzerinden takip edilmektedir. Cihazlar

## 5.SORUMLULAR

Bu talimatın uygulanmasından tüm odyometristler sorumludur.