

	KALİTE YÖNETİM DOKÜMANLARI	Doküman No :BL-TL-18 Yayın Tarihi :01.08.2017 Revizyon No :00 Revizyon Tar:.... Sayfa No :1/2
	HEMOGRAM XS-1000 CİHAZI KULLANMA TALİMATI	

Revizyon No	Yapılan Revizyon	Rev. Sayfası	Revizyon Tarihi	Revizyonu Yapan
Gözden Geçirme	Gözden Geçirildi Son Gözden Geçirme:06.02.2018-01	Tüm İçerik	20.02.2019	Emine EREN Laboratuvar Sorumlu Teknisyeni
Gözden Geçirme	Gözden Geçirildi	Tüm İçerik	25.02.2022	Mesut ÖZDEMİR Laboratuvar Sorumlu Teknisyeni
HAZIRLAYAN		KALİTE SİSTEM ONAYI	ONAY	
LABORATUVAR SORUMLU DOKTORU		KALİTE YÖNETİCİSİ	BAŞHEKİM	

	KALİTE YÖNETİM DOKÜMANLARI	Doküman No :BL-TL-18 Yayın Tarihi :01.08.2017 Revizyon No :00 Revizyon Tar:.... Sayfa No :2/2
	HEMOGRAM XS-1000 CİHAZI KULLANMA TALİMATI	

1. AMAÇ VE KAPSAM

Bu talimatın amacı laboratuvarda bulunan hemogram xs-1000 cihazının kullanımında ve bakımında dikkat edilecek hususları belirlemektedir. Laboratuvar işleyiş sürecini kapsar.

2. TANIMLAR VE KISALTMALAR

3. REFERANS DOKÜMANLAR

4. UYGULAMA:

4.1.Cihazın hazırlanması;

Cihaza yıkama solüsyonu verilir. Solüsyon yıkadıktan sonra cihaz kontrolleri çalışılır. Ana ekranda **Aç** seçilir. Tüpün üstündeki lot numarası ekranda seçilir. **Ok** denir ve hasta yükleme kuyucuğuna konur, kuyunun önündeki butona basılır, ekranda sonuç gözükür. Kontroller uygun olmadığı zaman alarm verir. Böyle durumlarda tekrar yıkama yapıp kontrol edilir.

4.2.Günlük rutin çalışma;

Ana ekranda manual olan kısma barkot no yazılır. **Ok** tuşuna basılır.Tüp hasta yükleme kuyucuğuna konur ve öndeki butona basılır.Ekrandan sonuç takip edilir.

Hasta tüpleri racklara yerleştirilir. Sampler tuşuna basılır. Tüp konulan rack seçilir **ok** seçilir ve cihazın dışındaki gri butona basılır. Cihaz hastayı çalışır ve ekranda okunur.

5.SORUMLULAR

Bu talimatın uygulanmasından laboratuvar sorumlu teknisyeni ve laboratuvar teknisyenleri sorumludur.