

	KALİTE YÖNETİM DOKÜMANLARI	Doküman No :BL-TL-17 Yayın Tarihi :01.08.2017 Revizyon No :00 Revizyon Tar.:... Sayfa No :1/2
	HEMOGRAM XP 300 CİHAZI KULLANMA TALİMATI	

Revizyon No	Yapılan Revizyon	Rev. Sayfası	Revizyon Tarihi	Revizyonu Yapan
Gözden Geçirme	Gözden Geçirildi Son Gözden Geçirme:06.02.2018-01	Tüm İçerik	20.02.2019	Emine EREN Laboratuvar Sorumlu Teknisyeni
Gözden Geçirme	Gözden Geçirildi	Tüm İçerik	20.02.2022	Mesut ÖZDEMİR Laboratuvar Sorumlu Teknisyeni
HAZIRLAYAN		KALİTE SİSTEM ONAYI	ONAY	
LABORATUVAR SORUMLU DOKTORU		KALİTE YÖNETİCİSİ	BAŞHEKİM	

	KALİTE YÖNETİM DOKÜMANLARI	Doküman No :BL-TL-17 Yayın Tarihi :01.08.2017 Revizyon No :00 Revizyon Tar.:... Sayfa No :2/2
	HEMOGRAM XP 300 CİHAZI KULLANMA TALİMATI	

1. AMAÇ VE KAPSAM

Bu talimatın amacı laboratuvarda bulunan hemogram xp 300 cihazının kullanımında ve bakımında dikkat edilecek hususları belirlemektedir. Laboratuvar işleyiş sürecini kapsar.

2. TANIMLAR VE KISALTMALAR

3. REFERANS DOKÜMANLAR

4. UYGULAMA:

Laboratuvarda bulunan hemogram xp 300 cihazını kullanmadan önce; cihazın gerektirdiği şekilde kurulmuş ve bağlanmış olduğunu kontrol etmek gerekmektedir.

4.1. Cihazın Hazırlanması

Sabah hemogram kontrol kanı buzdolabından çıkarılır ve mikserde dönerek karışması sağlanır. Cihazın üzerinde shut down tuşuna basılır. Cell clean kan çekme çubuğuna konur ve yeşil butona basılır. Ekran da analyze seçilerek kontrol kanı okutulur. Ekranda aç seçilir .Kontrol kanının lot numarası ekrandan seçilir ve tüp çekme çubuğu kontrol kanına sokulur yeşil butona basılır. Çıkan sonuç değerleri normal Level kontrol kağıdı ile karşılaştırılır. Test değerleri uygun ise, sonuç kağıdı HBYS'de dosyasına konulur ve cihaz kullanıma hazırdır. Ancak test değerleri uygun değilse, cihaza yeniden cell clean ile tekrara yıkama verilip kontrol yapılır. Çıkan sonuçlar karşılaştırılır ve uygun değerlerse cihaz kullanıma hazır hale gelmiş olur.

4.2.Günlük Rutin Çalışma

Ekran üzerinden sample id seçilir.Hasta borkod numarası yazılır. ENTER tuşuna basılır. Kan çekme çubuğu hemogram tüpünün içine sokulur ve yeşil butona basılır. Ekranda runnig yazınca tüp çekilir. Cihaz sonucu yazılı olarak verir

Gün içinde belirli aralıklarla cihazın yıkama solüsyonu olan CELL CLEAN ile yıkama yapılır.

5.SORUMLULAR

Bu talimatın uygulanmasından laboratuvar sorumlu teknisyeni ve laboratuvar teknisyeni sorumludur.