

	KALİTE YÖNETİM DOKÜMANLARI	Doküman No :OH-TL-29 Yayın Tarihi :04.04.2011
	KÜVÖZ TEMİZLİK TALİMATI	Revizyon No :00 Revizyon Tar.:... Sayfa No :1/3

Revizyon No	Yapılan Revizyon	Rev. Sayfası	Revizyon Tarihi	Revizyonu Yapan
Gözden Geçirme	Gözden Geçirildi Son Gözden Geçirme:04.04.2018-08	Tüm İçerik	06.04.2019	Ece Nur TOPCU Eğitim ve Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi
Gözden Geçirme	Gözden Geçirildi	Tüm İçerik	10.04.2022	Ece Nur TOPCU Eğitim ve Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi
HAZIRLAYAN		KALİTE SİSTEM ONAYI	ONAY	
ENFEKSİYON KONTROL HEMŞİRESİ		KALİTE YÖNETİCİSİ	BAŞHEKİM	

	KALİTE YÖNETİM DOKÜMANLARI	Doküman No :OH-TL-29 Yayın Tarihi :04.04.2011
	KÜVÖZ TEMİZLİK TALİMATI	Revizyon No :00 Revizyon Tar.:... Sayfa No :2/3

1.AMAÇ VE KAPSAM

Kurulan bulunana tüm küvözlerin temizlik işlemlerinin nasıl ve hangi yöntemlerle yapılacağıının belirlenmesidir.Temizlik hizmetlerini kapsar.

2.TANIMLAR VE KISALTMALAR

3. REFERANS DOKÜMANLAR

Eldiven Kullanma ve El Yıkama Talimatı

Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliğine

Dezenfektan Kullanım Listesi

Yıllık Eğitim Planı

Atıkların Toplanması , Taşınması ve

Depolanması Prosedürü

Tehlikeli Maddeler Rehberi

Küvöz Temizlik Kontrol Formu

4.UYGULAMA

- Her yeni hasta mutlaka temiz küvöze alınmalıdır, bebek çıktıktan sonra küvöz dezenfekte edilerek kullanıma hazır halde bırakılmalıdır.
- Küvözlerin temizliğinde her küvöz için ayrı bir bez kullanılmalıdır.
- Uzun süre yatan bebeklerde haftada bir kez,
- 1000gr'ın altında yatan bebeklerde küvözlerin dezenfeksiyonu en az beş günde bir kez yapılmalıdır. Bebekler başka bir kuvöze alınarak dezenfekte edilmelidir.

4.1. Günlük Temizlik

- Temizlik günlük olarak ve görünür bir kirlenme olduğunda yapılmalıdır.
- Günlük temizlikte küvözün içi ve dışı ile içten dışa ve yukarıdan aşağıya doğru Dezenfektan Kullanım Listesi'nde belirtilen uygun dezenfektan ile silinmelidir.
- En yoğun kontaminasyon bölgesi olan dış kapaklar, bu kapakları saran yastıkçıklar ve Dezenfektan Kullanım Listesi'nde belirtilen uygun dezenfektan ile silinmelidir.
- Küvözlerin nemlendirici kapları distile su ile doldurulmalıdır.
- Yapılan temizlik işlemi Küvöz Temizlik Kontrol Formu'na kaydedilir.

4.2. Taburculuk Sonrası Temizlik

- Küvözün çıkabilen tüm parçaları birbirinden ayrılır.
- Temiz kuru bez ile su ve deterjan (5lt suya 1 adet klor tablet konarak hazırlanır.) kullanılarak küvözün tüm parçaları tek tek silinir.
- Silinme işlemi tamamlanan parçalar durulanır ve kağıt havlu ile kurulanır.

	KALİTE YÖNETİM DOKÜMANLARI	Doküman No :OH-TL-29 Yayın Tarihi :04.04.2011
	KÜVÖZ TEMİZLİK TALİMATI	Revizyon No :00 Revizyon Tar.:... Sayfa No :3/3

- Yüzeyler kuruduktan sonra küvöz parçaları toparlanır küvözün iç ve dış yüzeyi de dezenfekte edildikten sonra bebek küvöze alınacak şekilde hazır bırakılır.
- Küvözlerin nemlendirici kapları su ve deterjan (5lt suya 1 adet klor tablet konarak hazırlanır.) kullanılarak dezenfekte edilir ve kuru bir şekilde saklanır.
- Yapılan temizlik işlemi Küvöz Temizlik Kontrol Formu'na kaydedilir.
- Yatak yüzeyinde bütünlük bozulmuş ise etkin dezenfeksiyonu önleyeceğinden yenisi ile değiştirilir.
- Küvöz dezenfeksiyonu dışında filtre bakımı ve değişimi 3 aylık periyotlarda yapılmalıdır.

4.3. Kan ve/veya vücut sıvıları döküldüğünde ise temizlik yapılırken aşağıdaki hususlara dikkat edilir;

- Uygun koruyucu giysi ve eldiven Eldiven Kullanma ve El Yıkama Talimatı 'na göre giyilir.
- Kan ve vücut sıvıları döküldüğünde beklemeden hemen kağıt havlu ile kaba kiri alınır ve atıklar Atıkların Toplanması , Taşınması ve Depolanması Prosedürü'ne göre kırmızı poşete atılır.
- Öncelikle ortamdaki kan veya vücut sıvısı fiziki olarak temizlenir. Temizlemede kullanılan temizlik bezi enfekte çamaşır/ tekstil olarak kabul edilir. Çamaşırhaneye kırmızı poşetle gönderilir. Temizlik işlemi sonrası alan Dezenfektan Kullanım Listesinde belirtilen uygun dezenfektanlı solüsyon ile dezenfekte edilir.

4.4. Çalışan Güvenliği-Kullanılan Dezenfektanlar İle İlgili Alınan Önlemler

- Temizlik işlemi sırasında kullanılan dezenfektanların bir çoğu Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliğine göre Tehlikeli Madde sınıfına girilmektedir. Bu yüzden Tehlikeli Maddeler Envanterinde bulunmaktadır. Dezenfektanlar ile ilgili MSDS(Ürün Güvenlik Bilgi Formu) firmalardan istenmekte olup, bölümlerde bulunan Tehlikeli Maddeler Rehberi içinde bu maddelerin MSDS leri bulunmaktadır. Tehlikeli Maddeler Rehberinde dezenfektanlar ile ilgili dikkat etmesi gereken konular, riskler, alınacak önlemler, depolama ve kullanma yöntemleri gibi konular bulunmaktadır.
- Personele Yıllık Eğitim Planına uygun olarak yılda bir defa Tehlikeli Maddeler, MSDS ve dikkat edilmesi gereken kuralları içeren eğitim verilmektedir.

5.SORUMLULAR

Bu talimatın uygulanmasından küvöz kullanan sağlık çalışanları ve ilgili hizmetli personel sorumludur.