

OPTİMED	KALİTE YÖNETİM DOKÜMANLARI	Doküman No :HB-TL-60 Yayın Tarihi :01.12.2017 Revizyon No :00 Revizyon Tar:... Sayfa No :1/2
	C5 KALP AKCİĞER MAKİNESİ KULLANIM TALİMATI	

Revizyon No	Yapılan Revizyon	Rev. Sayfası	Revizyon Tarihi	Revizyonu Yapan
Gözden Geçirme	Gözden Geçirildi. Son Gözden Geçirme:05.12.2018-01	Tüm sayfalar	10.09.2019	Burak ÖZER Perfüzyonist
Gözden Geçirme	Gözden Geçirildi.	Tüm sayfalar	12.09.2022	Burak ÖZER Perfüzyonist

1. AMAÇ VE KAPSAM

HAZIRLAYAN	KALİTE SİSTEM ONAYI	ONAY
PERFÜZYONİST	KALİTE YÖNETİCİSİ	BAŞHEKİM

	KALİTE YÖNETİM DOKÜMANLARI	Doküman No :HB-TL-60 Yayın Tarihi :01.12.2017
	C5 KALP AKCİĞER MAKİNESİ KULLANIM TALİMATI	Revizyon No :00 Revizyon Tar:... Sayfa No :2/2

Bu prosedürün amacı; C5 kalp akciğer makinesi kullanımı için uygulanacak standart işlemlerin belirlenmesidir. Perfüzyon işleyiş sürecini kapsar.

1. TANIMLAR VE KISALTMALAR

O² :Oksijen

BSA :

2. UYGULAMA

- Cihazın fişi ups güç sistemi bağlı prize takılır
- Power tuşu ile sistem açılışı yapılır
- BSA hesaplama sistemine hastanın boy ve kilosu yazılır
- Oksijenatör ve tübing set bağlantıları yapıp set prime edilir setin havası çıkarılır
- Isıtıcı soğutucu bağlantıları yapıp prime solüsyonu 34 °c ' ye ayarlanır
- O² ve air bağlantıları hastanenin gaz sistemine yapılır
- Kanülasyon öncesi arterial pompa başlığı oklüzyonu ve diğer pompa başlıklarının oklüzyon ayarları kontrol edilip ayarlamaları yapılır
- İşlem sonrası hasta yatağa alınana kadar hatlar hastadan alınmaz, hasta yatağa alınıp yoğun bakıma geçtikten sonra oksijenatör ve tübing set kırmızı tıbbi atık torbasına atılıp iki poşet haline ağızı bağlanır
- Gaz bağlantıları hastane sisteminden ayrılır
- Power tuşundan kapatma işlemi yapılır
- Pompa uygun dezenfektan ile silinip temizliği yapılır
- Elektrik bağlantısı prizden çekilir ve sistemin üzeri örtülür
- Uygun temizlik ve bakım talimatlarına uyulur.

5.SORUMLULAR

Bu talimatın uygulanmasından perfüzyonist sorumludur.

HAZIRLAYAN	KALİTE SİSTEM ONAYI	ONAY
PERFÜZYONİST	KALİTE YÖNETİCİSİ	BAŞHEKİM