

	KALİTE YÖNETİM DOKÜMANLARI	Doküman No:ML-TL-06 Yayın Tarihi :27.11.2023 Revizyon No :00 Revizyon Tar:... Sayfa No: 1 / 3
	YASAKLI MADDE ANALİZ NUMUNESİ ALMA VE ÇALIŞMA TALİMATI	

Revizyon No	Yapılan Revizyon	Rev. Sayfası	Revizyon Tarihi	Revizyonu Yapan
Gözden Geçirme	Gözden geçirildi.	Tüm sayfalar	27.11.2023	Mesut ÖZDEMİR Laboratuvar Sorumlusu

HAZIRLAYAN	KALİTE SİSTEM ONAYI	ONAY
LABORATUVAR SORUMLU TEKNİKERİ	KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ	BAŞHEKİM

1.AMAÇ VE KAPSAM

	KALİTE YÖNETİM DOKÜMANLARI	Doküman No:ML-TL-06 Yayın Tarihi :27.11.2023 Revizyon No :00 Revizyon Tar.:... Sayfa No: 2 / 3
	YASAKLI MADDE ANALİZ NUMUNESİ ALMA VE ÇALIŞMA TALİMATI	

Optimed Sağlık Hizmetleri laboratuvarlarında uluslararası standartlarına uygun bir şekilde, yasaklı madde numunesini almayı ve analizini yapmayı amaçlamaktadır. Bu talimat yasaklı madde numune alma ve analiz sürecini kapsar.

2.TANIMLAR VE KISALTMALAR

HBYS: Hastane Bilgi Yönetim Sistemi

3.REFERANS DOKÜMANLAR

Ek 2 Bilgilendirme Formu

Numune Gözetim Zincir Formu

4.UYGULAMA

4.1. Numune Alma

- Numuneyi verecek kişiye Ek 2 Bilgilendirme Formu okutularak imzası alınır.
- Numuneyi verecek kişiye Numune Gözetim Zincir Formu'ndaki kimlik bilgileri kaydedilir.
- Numuneyi verecek kişi gözetimli numune alma odasına alınarak laboratuvar personeli gözetiminde numune verilmesi sağlanır.
- Numune Gözetim Zincir Formu'nda bulunan numuneyi alan veya gözetimi uygulayan personel bölümüne gözetim yapan laboratuvar personelinin ad-soyad-tarih-saat-imzası doldurulur.
- Verilen numune mikrobiyoloji laboratuvarına gözetimi uygulayan laboratuvar personeli eşliğinde bırakılır.

4.2.Yasa Dışı Madde Numune Kabulü Ve Ön Analiz İşlemleri

- Mikrobiyoloji laboratuvarına gelen idrar numunesi HBYS üzerinden numune kabulü yapılır.
- Mikrobiyoloji laboratuvarına gelen numune bilgileri alınarak numune hacmi ve numune sıcaklığı Numune Gözetim Zincir Formu'ndaki numune bilgileri bölümüne kaydedilir.
- Mikrobiyoloji laboratuvarında numuneyi alan laboratuvar personeli Numune Gözetim Zincir Formu'ndaki numune kabul işlemleri bölümünde bulunan ad-soyad-tarih saat-imza bilgilerini doldurur.
- Verilen numunenin İdrar bütünlük testi yapılarak numunenin gerçek idrar olup olmadığının analizi yapılır.
- İdrar bütünlük testinde en az;
 - PH
 - Dansite
 - Sıcaklık
 - Nitrit
 - İdrarda kreatinin parametrelerine bakılarak işleme alınır.

İdrar bütünlük testinden geçmeyen numuneler reddedilerek kişinin yeniden numune vermesi sağlanır.

4.3 Yasadışı Madde Numunesi Analiz İşlemleri

	KALİTE YÖNETİM DOKÜMANLARI	Doküman No:ML-TL-06 Yayın Tarihi :27.11.2023 Revizyon No :00 Revizyon Tar.:... Sayfa No: 3 / 3
	YASAKLI MADDE ANALİZ NUMUNESİ ALMA VE ÇALIŞMA TALİMATI	

- İdrar bütünlük testinden geçmiş olan numuneler işleme alınmak üzere yasadışı madde analiz kiti idrar kabının içine daldırılarak 30 saniye beklenir.
- Analiz için hazırlanan yasadışı madde analiz kiti OG-D180 HEALGEN cihazının okuma gözüne yerleştirilerek analizi sağlanır.
- Çıkan sonuçlar HBYS sistemine yazılarak doktor onayına sunulur.
- Pozitif çıkan numune örnekleri anlaşmalı olduğumuz İstanbul 3 No 'Lu Halk Sağlığı Laboratuvarı'na gönderilir.

5.SORUMLULAR

Bu talimatın uygulanmasından Laboratuvar Sorumlu Hekimi, Laboratuvar Sorumlu Teknisyeni ve laboratuvar teknisyenleri sorumludur.