

Revizyon No	Yapılan Revizyon	Rev. Sayfası	Revizyon Tarihi	Revizyonu Yapan
Gözden Geçirme	Gözden geçirildi.	Tüm sayfalar	20.10.2023	Ayşe KARAPINAR Anestezi Sorumlu Teknisyeni
HAZIRLAYAN		KALİTE SİSTEM ONAYI		ONAY
ANESTEZİ SORUMLU TEKNİSYENİ		KALİTE YÖNETİCİSİ		BAŞHEKİM

1.AMAÇ ve KAPSAM:

Bu talimatın amacı Anestezi cihazının doğru ve güvenli kullanımını sağlamak ve hastada oluşabilecek cihazla ilgili komplikasyonlarını önlemektir. Ameliyathanede bulunan Drager ve GE marka anestezi cihazını kapsar.

2. TANIMLAR VE KISALTMALAR

HBYS :Hastane Bilgi Yönetim sistemi

3. REFERANS DOKÜMANLAR

Cihaz Yönetimi Prosedürü

4. UYGULAMA

- Cihazın elektrik bağlantısı kontrol edilir. Anestezi cihazının fişi prize takılır.
- Gösterge panelleri kontrol edilir.
- Anestezi cihazının inspirasyon ve ekspirasyon hortumları takılır. Atık gaz bağlantı hortumu kontrol edilir.
- Yedek O2 ve N2O tüplerinde yeterli gaz (3 bar-6 bar) olup olmadığı kontrol edilir. Kontrolden sonra tüp vanaları kapatılır.
- Merkezi sistem o2 ve n2O basınçları kontrol edilir.
- Volatil gazlar'ın (Sevorane, İzoflurane, Desflurane, vb) Vaporizatördeki doluluğuna bakılır. Ventilasyon sistemleri (erişkin, çocuk) kontrol edilir.
- Sodalime' daki renk değişikliğine bakılır. Renk mora yakınsa yeni sodalime ile değiştirilir.
- Sisteme full O2 basılarak balonun doluluğuna bakılır. Gerekli sistemsel kalibrasyonlar yapılır. Tüm kontroller tamamlandıktan sonra vakalar başlatılır.
- Hasta uyutulduktan sonra hasta takibi için monitörden gerekli derivasyonlar seçilir.
- Hasta uyandırıldıktan sonra anestezi cihazı kontrol edilir ve sonraki vaka için hazır halde bırakılır.

4.1.Cihazın Bakım Kalibrasyon ve Temizliği

Cihaz Yönetimi Prosedürü'ne göre hareket edilir. Cihazın bakım ve kalibrasyon bilgileri ve kayıtları HBYS Demirbaş Yönetimi modülünde mevcuttur. Cihazın temizliği hafif nemli bezle yapılır.

5.SORUMLULAR

Bu talimatın uygulanmasından Anestezi Uzmanı ve anestezi teknisyenleri sorumludur.