

	KALİTE YÖNETİM DOKÜMANLARI	Doküman No :MC-TL-08 Yayın Tarihi :20.11.2019
	PERFÜZÖR (ENJEKTOMAT) KULLANMA TALİMATI	Revizyon No :00 Revizyon Tar.:... Sayfa No :1/2

Revizyon No	Yapılan Revizyon	Rev. Sayfası	Revizyon Tarihi	Revizyonu Yapan
Gözden Geçirme	Gözden geçirildi	Tüm sayfalar	01.12.2022	Bilge KAVİL YDYB Sorumlu Hemşiresi
HAZIRLAYAN		KALİTE SİSTEM ONAYI		ONAY
YDYB SORUMLU HEMŞİRESİ		KALİTE YÖNETİCİSİ		BAŞHEKİM

	KALİTE YÖNETİM DOKÜMANLARI	Doküman No :MC-TL-08 Yayın Tarihi :20.11.2019
	PERFÜZÖR (ENJEKTOMAT) KULLANMA TALİMATI	Revizyon No :00 Revizyon Tar.:... Sayfa No :2/2

1. AMAÇ VE KAPSAM

Bu talimatın amacı, perfüzör (enjektomat) cihazının kullanımını açıklamaktır. Hastalara ilaç/mayı verilme sürecini kapsamaktadır.

2. TANIMLAR VE KISALTMALAR

YDYB: Yenidoğan Yoğun Bakım

Perfüzör: Bir ilacın bir hastaya belli bir oranda ve belli bir sürede verilmesi için kullanılan ve belirli doz ayarlaması yapılabilen bir medikal yardımcı cihazdır.

3. REFERANS DOKÜMANLAR

Cihaz Yönetimi Prosedürü

Dezenfektan Kullanım Listesi

4. UYGULAMA

Power(açma) tuşuna basınız.

Enjektör kanatları dikey olacak şekilde enjektörü yuvanın sağ tarafındaki açıklıktan yerleştiriniz.

Kapağı ve tutucu kapatınız.

Otomatik şırınga boyu tanıma özelliği mevcuttur.

Hasta bağlantısını yapınız.

Ana menüde akış hızı görülünceye kadar başlangıç menüsündeki sorular yukarı- aşağı tuşuyla cevaplanır.

Akış hızı ayarlanır.

Start tuşuna basarak pompayı çalıştırınız.

Nearly empty(sıvı miktarı azaldı alarmı) silence tuşuna basılır kalan sıvının devamı için.

Occlusion(tıkanık alarmı) damaryolu veya serum seti kontrol edilir.

Perfüzörü kapatmak için power tuşuna 3 saniye basınız.

4.1.Cihaz Arızası, Bakımı ve Kalibrasyonu

Cihaz arızaları birim çalışanı veya sorumlusu tarafından **HBYS** 'de arıza kaydı girilip biyomedikal birimine iletilir.

Cihazın bakım, onarım ve kalibrasyonu Cihaz Yönetimi Prosedürü'ne göre yapılır.

4.2.Cihaz Temizliği

Cihazın temizliği Dezenfektan Kullanım Listesi' nde yer alan uygun ürün ile yapılır.

5.SORUMLULAR

Bu talimatın uygulanmasından YDYB Sorumlu Hemşiresi, Başhemşire ve YDYB hemşireleri sorumludur.