

	KALİTE YÖNETİM DOKÜMANLARI	Doküman No : MC-TL-06 Yayın Tarihi : 16.12.2019 Revizyon No :00 Revizyon Tar.... Sayfa No :1/3
	SERUM ISITICISI (MİKRODALGA) CİHAZI KULLANIM TALİMATI	

Revizyon No	Yapılan Revizyon	Revizyon Sayfası	Revizyon Tarihi	Revizyonu Yapan
Gözden Geçirme	Gözden geçirildi.	Tüm sayfalar	20.12.2022	Hasan COŞKUN Ameliyathane Sorumlu Hemşiresi

HAZIRLAYAN	KALİTE SİSTEM ONAYI	ONAY
AMELİYATHANE SORUMLU HEMŞİRESİ	KALİTE YÖNETİCİSİ	BAŞHEKİM

OPTIMED	KALİTE YÖNETİM DOKÜMANLARI	Doküman No : MC-TL-06 Yayın Tarihi : 16.12.2019 Revizyon No :00 Revizyon Tar.... Sayfa No :2/3
	SERUM ISITICISI (MİKRODALGA) CİHAZI KULLANIM TALİMATI	

1.AMAÇ VE KAPSAM

Bu talimatın amacı, infüzyon işlemleri esnasında hastanın olabilecek hipotermi tehlikesini ortadan kaldırmak amacı ile hastaya verilecek sıvıların kontrollü bir şekilde ısıtılmasını gerçekleştirmektir. Kurumdaki serum ısıtıcısı (mikrodalga) cihazının kullanımını kapsamaktadır.

2.TANIMLAR VE KISALTMALAR

HBYS: Hastane Bilgi Yönetim Sistemi

3. REFERANS DOKÜMANLAR

Cihaz Yönetimi Prosedürü

4.UYGULAMA

Isıtılacak olan serum (izotonik) ambalajı pvc veya cam olmalıdır. Serum serum ısıtıcısının içerisine yerleştirilir. Cihazın fişi prize takılır. Serum cihazın için yerleştirildikten sonra cihazın kapağı kapatılır. Daha sonra ısıtılması gereken dakikaya basılır. Ortalama olarak 5 dakika ısıtma işleminden kullanılacak serum



hazırlanmış olunur. Isıtılan serumlar hastanın batin içi irrigasyon (yıkama) amaçlı veya endoskopik optik gibi cihazların buğulanmasını önlemek amaçlı olarak kullanılır.

HAZIRLAYAN	KALİTE SİSTEM ONAYI	ONAY
AMELİYATHANE SORUMLU HEMŞİRESİ	KALİTE YÖNETİCİSİ	BAŞHEKİM

OPTIMED	KALİTE YÖNETİM DOKÜMANLARI	Doküman No : MC-TL-06 Yayın Tarihi : 16.12.2019 Revizyon No :00 Revizyon Tar.... Sayfa No :3/3
	SERUM ISITICISI (MİKRODALGA) CİHAZI KULLANIM TALİMATI	



4.1. Cihaz Bakım ve Kalibrasyonu

Temizleme ve dezenfeksiyondan önce cihazın güç kablosu prizden çekilir. Cihazın nemli bez ile temizlenir. Cihazların kalibrasyon ve bakım planları, yapılan bakım, kalibrasyon işlemleri HBYS 'de bulunmaktadır. Cihazın bakım ve kalibrasyonu Cihaz Yönetimi Prosedürü'ne göre yapılır. hastane kalibrasyon planına uygun olarak yapılır.

5.SORUMLULAR

Bu talimatın uygulanmasından Ameliyathane Sorumlu Hemşiresi ve hekim sorumludur.

HAZIRLAYAN	KALİTE SİSTEM ONAYI	ONAY
AMELİYATHANE SORUMLU HEMŞİRESİ	KALİTE YÖNETİCİSİ	BAŞHEKİM